

Levamed

Informace o účelu použití

Levamed je hlezenní ortéza. Výrobek je určen výhradně k použití po odborném nasazení na hlezno a pouze na nepoškozenou kůži.

Oblasti použití

- Pocit nestability hlezenního kloubu (po akutních, příp. chronických po dřívějších poraněních vazů)
- Stavby podráždění v kloubu (např. přetížení, poranění, operace) ve spojení s otoky a exudáty
- Záněty kloubu (artritida)
- Bolestivé opotřebení kloubu (artróza)

Vedlejší účinky / kontraindikace

Vedlejší účinky na celé tělo nejsou v současné době známy. Ovšem při příliš pevně upnutých pomůckách, např. bandážích, může individuálně docházet k lokálním otlakům nebo zúžení cév nebo nervů. Z tohoto důvodu byste se v následujících případech měli před použitím pomůcky poradit se svým ošetřujícím lékařem:

- Onemocnění nebo poranění kůže v oblasti použití, zejména při zánětlivých příznacích (nadměrné zahřátí, otok nebo zarudnutí),
- Poruchy citlivosti a prokrvení dolních končetin, nohou (např. při diabetu),
- Poruchy odtoku lymfy – dále nejednoznačné otoky měkkých tkání kolem oblasti použití

Kombinace s jiným produkty, např. kompresními punčochami, je předem nezbytné projednat s ošetřujícím lékařem.

Působení / pokyny pro nošení

Levamed vyvolává díky souhře kompresivní tkaniny a dvou integrovaných silikonových výztuží masážní účinek podporující prokrvování, který napomáhá rozpouštění otoků a exudátů. Zmírňuje podráždění a bolesti. Zároveň zlepšuje svalové řízení a tělesnou stabilizaci hlezenního kloubu.

Největší účinek dosahují bandáže během tělesné činnosti. Zásadně je možné bandáž nosit celodenně. Ovšem důležitý je vlastní pocit z nošení. Při delších klidových přestávkách (např. dlouhé sezení/jízda autem, spánek) je vhodné bandáž sejmout.

Pokud se během nošení dostaví nadměrné bolesti nebo nepříjemný pocit, neprodleně produkt sejměte a kontaktujte svého lékaře nebo specializovanou prodejnu zdravotnických potřeb.

Bandáž je vhodná pro použití ve vodě. Následně bandáž důkladně vymáchejte.

Použití / příložen

- Bandáž na horním konci přehněte směrem ven až k začátku silikonové vložky (obr. 1).
- Přehněte horní část bandáže až k začátku silikonové výztuže směrem ven (obr. 1).
- Bandáž uchopte uprostřed silikonových výztuží a natáhněte ji přes nohu tak, aby dobře seděla pata (obr. 2).
- Horní část bandáže přehněte opět nazpět a bandáž příp. vytáhněte nahoru (obr. 3). Podle potřeby upravte polohu silikonových výztuží tak, aby obě správně přiléhaly kolem kotníku.

Dbejte prosím na to, aby první přiložení bandáže proběhlo pod vedením školeného kvalifikovaného personálu.

Pokyny k praní

Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.

- Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°C za použití pracího prostředku na jemné prádlo bez bělidel.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny pro uskladnění

Skladujte při pokojové teplotě na suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a vlhkostí.

Složení materiálu

Polyamid, polyester, elasthan

Záruka / ručení

V rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.

Váš medi Team

Vám přeje rychlé uzdravení!