


## INCIDIN LIQUID SPRAY

Kapalný dezinfekční prostředek na bázi alkoholu k okamžitému použití pro rychlou a účinnou dezinfekci zdravotnických prostředků a povrchů.



**INCIDIN LIQUID SPRAY** je deklarován jako zdravotnický prostředek,  0297  
třída IIa

Výhody pro uživatele:

- vhodné pro lesklé plochy (nerez, sklo). Povrch je po použití lesklý, beze šmouh a skvrn.
- neředí se, působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua
- neobsahuje aldehydy ani jiné přídavné látky
- jeho složení je kompatibilní s materiály z kovu a plastů odolných vůči alkoholu

Spektrum účinnosti: přípravek je účinný proti bakteriím (vč. TBC), mikroskopickým kvasinkovitým houbám a obaleným virům (vč. HBV/HCV/HIV), Rota a Noro virům. Certifikován VAH dle metodiky DGHM.

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 35 g propan-2-olu, 25 g propan-1-olu

	
Dezinfekce povrchů dle metodiky VAH s a bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - kvasinky, tuberkulocidní), Čisté & Nečisté podmínky / Дезінфекція поверхонь згідно VAH з механічною дією та без неї (бактерицидні властивості, протигрибкові властивості, туберкулоцидні властивості), Слабке та сильне навантаження	5 min
Rychlá dezinfekce dle metodiky DGHM 2001 bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - kvasinky, tuberkulocidní), Čisté & Nečisté podmínky / Швидка дезінфекція поверхонь без механічної дії згідно DGHM - метод 2001 (бактерицидні властивості, протигрибкові властивості), Слабке та сильне навантаження	1 min
EN 13727 (baktericidní / бактерицидні властивості) EN 13624 (fungicidní - kvasinky / протидріжджеві властивості) EN 14348 (tuberkulocidní / туберкулоцидні властивості)	1 min
Účinek proti obaleným virům (vč. HIV, HBV, HCV)* dle doporučení RKI 1/2004, Čisté & Nečisté podmínky / Обмежені віруліцидні властивості згідно Рекомендацій 1/2004 (включаючи ВІЛ, гепатит В, гепатит С), Слабке та сильне навантаження	30 sec
Adeno virus* / Adeno* Rota virus* / Rota*	1 min 30 sec
Рарова virus* / Рарова* Noro virus* / Норо (випробувано на щурячий норовірус)*	10 min

\* DVV 2008

Oblast použití: Incidin liquid spray se uplatní pro plošnou dezinfekci ve všech typech zdravotnických zařízení, je ideální pro stomatologické ambulance, penziony seniorů, v práci pečovatelské služby, v provozu sanitek a při přepravě pacientů vůbec. Doporučujeme jej i pro práci v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v provozovnách kosmetiky, holičství, manikúry, pedikúry, soláriích, v masérských a lázeňských službách. Lze jej použít pro rychlou a bezpečnou dezinfekci všech ploch a předmětů odolných vůči alkoholům.

**Návod k použití:** přípravek je určen pro okamžitou aplikaci. Neředí se!  
Neředěný přípravek v dostatečném množství (max. 40 ml/m<sup>2</sup>) nastříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm na povrchy a předměty odolné vůči působení alkoholu a ponechte působit po předepsanou expoziční dobu (viz tabulka) nebo zaschnout. Dbejte na dostatečné a rovnoměrné nanesení.

**Bezpečnost:** Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro zdraví člověka dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (Varování; Hořlavé kapaliny, Kategorie 3, H226; Podráždění očí, Kategorie 2, H319; Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, Kategorie 3, Centrální nervový systém, H336) nebo dle směrnice č. 1999/45/ES a 67/548/EHS (Xi; DRÁŽDIVÝ; R10; R67; R36) Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Při práci s koncentrovaným přípravkem dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení, které naleznete v příslušném bezpečnostním listu přípravku.

Bezpečnostní upozornění:

Plný text R-vět

R11: Vysoce hořlavý. R36: Dráždí oči. R41: Nebezpečí vážného poškození očí.

R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Plný text H-vět

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Prevence:

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280: Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

Před použitím výrobku odpojte elektrická zařízení od zdroje el. energie a proveďte preventivní opatření proti vzniku výbuchu. Pouze pro profesionální použití.

Skladování: skladujte v originálních obalech při teplotách od 0°C do 25°C.

Koncentrovaný přípravek nevylévejte do kanalizace. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

**Minimální trvanlivost:** 48 měsíců

**Balení:**

600 ml PE láhev baleno v kartonu po 12 kusech s 12 kusy aplikátorů