

NÁVOD K POUŽITÍ - NÁSTAVEC NA WC

AST 500400 CLIPPER I

AST 500410 CLIPPER II – bez poklopu

AST 500411 CLIPPER III – s poklopem

AST 500420 CLIPPER IV – bez poklopu, s madly

AST 500421 CLIPPER V – s poklopem a madly

POUŽITÍ: Nástavec je určen k umístění ke standardní míse. Zvyšuje posez o 11 cm. Nástavce na WC Clipper jsou vhodné pro většinu toaletních mís, včetně toaletní mísy typu „compact“. Díky svojí měkkosti zajišťují komfortní používání.

POPIS: Konstrukce nástavce na WC Clipper umožňuje velmi snadnou montáž: stačí nástavec jednoduše umístit na mísu, a následně zacvaknout 4 držáky (7-mi stupňový systém zacvaknutí). Chcete-li přesunout modré držáky, je nutné odblokovat pojistku tak, aby se držák mohl volně pohybovat. Držáky uvolněte do takové pozice, aby bylo možné nástavec položit na mísu. Následně, pomocí držáků, upevněte nástavec.

POZOR: Před použitím zkontrolujte, zda je nástavec bezpečně upevněn.

ÚDRŽBA: Nástavce Clipper lze čistit a udržovat běžnými čistícími dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a chlór a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Nástavce na WC Clipper jsou vyrobeny z pevné pěny pokryté vrstvou PVC. Díky své konstrukci zajišťují komfortní používání.

	HMOTNOST	MAX. ZATÍŽENÍ
CLIPPER I:	1,1 kg	185 kg
CLIPPER II:	1,2 kg	185 kg
CLIPPER III:	1,6 kg	185 kg
CLIPPER IV:	2,7 kg	110 kg
CLIPPER V:	3,1 kg	110 kg

ZÁRUKA: Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.

Výrobce: HERDEGEN Paris – Francie

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín,
tel.: 558 712 577, info@distrimed.cz



Datum poslední revize: 1. 1. 2013