

Manumed active

Informace o účelu použití

Výrobek Manumed active je kompresní bandáž zápěstního kloubu. Výrobek je určen výhradně k ortotické terapii zápěstního kloubu, pokožka v oblasti přiložení ortézy nesmí být poškozena nebo poraněná.

Oblasti použití

- bolestivé opotřeбенí zápěstního kloubu (artróza)
- iritační stavy a záněty zápěstního kloubu (např. artritida, revma, v důsledku přetížení, po operacích, atd.)
- poranění zápěstního kloubu, např. vymknutí kloubu
- tendovaginitida
- pocity instability v zápěstním kloubu

Vedlejší účinky / kontraindikace

Vedlejší účinky na celé tělo nejsou v současné době známy. Ovšem při příliš pevně upnutých pomůckách, např. bandážích, může individuálně docházet k lokálním otlakům nebo zúžení cév nebo nervů. Z tohoto důvodu byste se v následujících případech měli před použitím pomůcky poradit se svým ošetřujícím lékařem:

- onemocnění nebo poranění kůže v oblasti použití, zejména při zánětlivých příznacích (nadměrné zahřátí, otok nebo zarudnutí),
- poruchy citlivosti a prokrvení v oblasti předloktí a ruky),
- poruchy odtoku lymfy – dále nejednoznačné otoky měkkých tkání kolem oblasti použití

Kombinace s jinými produkty, např. kompresními punčochami, je předem nezbytné projednat s ošetřujícím lékařem.

Působení / pokyny pro nošení

Souhrou kompresivní pleteniny, pásu a individuálně přizpůsobitelné dlahy docílíte Manumed stabilizační efekt, který zamezuje škodlivým pohybům zápěstního kloubu. Tím dochází k odlehčení svalů, šlach a úponů šlach předloktí ke snížení iritací. Komprese pleteniny navíc zabraňuje šíření otoku.

Zásadně je možné bandáž nosit celodenně, při delších klidových přestávkách (např. při spánku) je vhodné bandáž sejmout. Důležitý je přitom vlastní pocit z nošení. Pokud se během nošení dostaví nadměrné bolesti nebo nepříjemný pocit, neprodleně produkt sejměte a kontaktujte svého lékaře nebo specializovanou prodejnu zdravotnických potřeb.

Bandáž je vhodná i pro použití ve vodě. Následně bandáž důkladně vymáchejte.

Použití / přiložení

Před přiložením bandáže otevřete pás.

1. Přehrněte dolní konce bandáže. Dlahu poté zasuňte do příslušné kapsy na vnitřní straně bandáže. Dbejte přitom na správné nasměrování tvaru dlahy a kapsy.
2. Přetáhněte bandáž přes ruku. Přitom musí být písmeno „m“ vidět na hřbetu ruky.
3. Zavřete pás tak, aby se otvor v pásu nacházel v poloze nad vnějším kloubem ruky.

K sejmutí otevřete pás. Uchopte bandáž ze směru dlaně a tlakem na vnitřní kapsu a dlahu stáhněte bandáž z ruky.

Dbejte prosím na to, aby první přiložení bandáže proběhlo pod vedením školeného kvalifikovaného personálu.

Přízpůsobení dlahy

Dlahu lze při teplotě ca. 200 °C individuálně přizpůsobit.

Pokyny k praní

Před praním uzavřete pásky na suchý zip a odstraňte dlahy kloubu. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.

- Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°C za použití pracího prostředku na jemné prádlo bez bělidel.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny pro skladování

Skladujte při pokojové teplotě na suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a vlhkostí.

Složení materiálu

Polyamide, polyester, Elastan

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.

Váš medi Team

Vám přeje rychlé uzdravení!