

NÁVOD K POUŽITÍ



STOLEK K LŮŽKU EASY

421 000 – barva šedá

421 014 – barva buk



NÁVOD K POUŽITÍ



STOLEK K LŮŽKU EASY

421 000 – barva šedá

421 014 – barva buk



Použití:

Polohovací pojízdný stolek je určen k lůžkům všech konstrukcí a výšek z levé i pravé strany. Slouží především k servírování stravy u ležících pacientů, ale také pro čtení nebo jako odkládací stolek. Lze výškově polohovat a horní desku lze oboustranně naklápět. Pojezdová kolečka jsou vybavená brzdou. Minimální prostor pod postelí k pohodlnému zajíždění je 10 cm od podlahy. Všechny díly stolku jsou vyrobeny z omyvatelných materiálů.

Specifikace:

Deska stolku: 60 x 40 cm (barva šedá anebo buk)

Výškové nastavení: 70 - 105 cm


Hmotnost: 7 kg

Max. nosnost: 10 kg

Balení:

Papírový karton s demontovaným stolkem.

- 1 konzola ve tvaru „L“ (šedá) **A**
- 1 konzola (chromovaná) **B**
- 2 příčníky s namontovanými kolečky (1 pár koleček s brzdami) **C**
- 2 šrouby **D**
- 1 černý plastový regulační šroub **E**
- 1 černá plastová regulační matice **F**
- 1 podložka **G**
- 1 chromovaná tyč **H**
- 1 deska stolku **I**

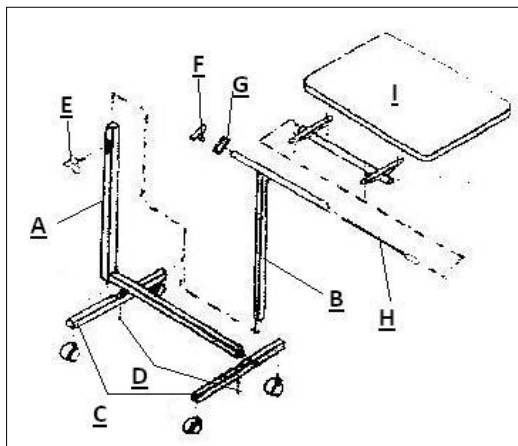

Montáž:

1. Ke konzole **A** ve tvaru „L“ přimontujte do výřezů pomocí šroubů **D** příčníky s kolečky **C**
2. Zasuňte chromovanou konzolu **B** do čtvercového otvoru konzoly **A**
3. Našroubujte černý plastový regulační šroub **E** do otvoru ve vrchní části konzoly **A** (regulace nastavení výšky)
4. Do šikmě seříznuté koncovky konzoly **B** zasuňte chromovanou tyč **H** tak aby seříznuté části na konzole a tyči zapadly do sebe. Na druhou stranu tyče nasadte podložku **G** tak aby uzavřela trubku a na trčící závit lehce našroubujte černou plastovou regulační matici **F**
5. Na takto smontovanou konzoli **B** a tyč **H** nasuňte desku stolku **I** a dotáhněte regulační matici **F** (regulace sklonu desky)

Údržba:

Stolek je potřeba pravidelně čistit navlhčeným hadrem s použitím šetrných čistících prostředků a následně důkladně osušit. K čištění nepoužívat přípravky s obsahem chloru a abrazivní čistící prostředky způsobující mechanické narušení povrchu.



Datum vytvoření návodu: 25.1.2012

Vyrobeno: HERDEGEN, Francie

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz

Použití:

Polohovací pojízdný stolek je určen k lůžkům všech konstrukcí a výšek z levé i pravé strany. Slouží především k servírování stravy u ležících pacientů, ale také pro čtení nebo jako odkládací stolek. Lze výškově polohovat a horní desku lze oboustranně naklápět. Pojezdová kolečka jsou vybavená brzdou. Minimální prostor pod postelí k pohodlnému zajíždění je 10 cm od podlahy. Všechny díly stolku jsou vyrobeny z omyvatelných materiálů.

Specifikace:

Deska stolku: 60 x 40 cm (barva šedá anebo buk)

Výškové nastavení: 70 - 105 cm


Hmotnost: 7 kg

Max. nosnost: 10 kg

Balení:

Papírový karton s demontovaným stolkem.

- 1 konzola ve tvaru „L“ (šedá) **A**
- 1 konzola (chromovaná) **B**
- 2 příčníky s namontovanými kolečky (1 pár koleček s brzdami) **C**
- 2 šrouby **D**
- 1 černý plastový regulační šroub **E**
- 1 černá plastová regulační matice **F**
- 1 podložka **G**
- 1 chromovaná tyč **H**
- 1 deska stolku **I**

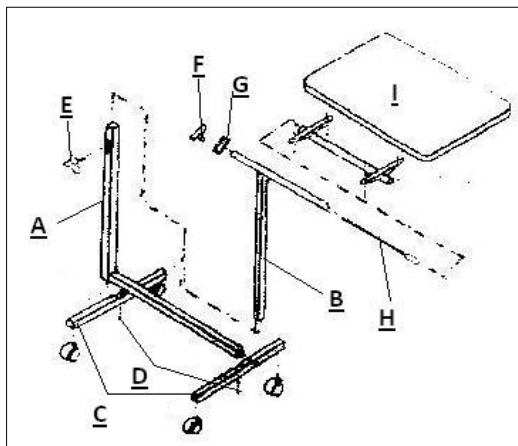

Montáž:

6. Ke konzole **A** ve tvaru „L“ přimontujte do výřezů pomocí šroubů **D** příčníky s kolečky **C**
7. Zasuňte chromovanou konzolu **B** do čtvercového otvoru konzoly **A**
8. Našroubujte černý plastový regulační šroub **E** do otvoru ve vrchní části konzoly **A** (regulace nastavení výšky)
9. Do šikmě seříznuté koncovky konzoly **B** zasuňte chromovanou tyč **H** tak aby seříznuté části na konzole a tyči zapadly do sebe. Na druhou stranu tyče nasadte podložku **G** tak aby uzavřela trubku a na trčící závit lehce našroubujte černou plastovou regulační matici **F**
10. Na takto smontovanou konzoli **B** a tyč **H** nasuňte desku stolku **I** a dotáhněte regulační matici **F** (regulace sklonu desky)

Údržba:

Stolek je potřeba pravidelně čistit navlhčeným hadrem s použitím šetrných čistících prostředků a následně důkladně osušit. K čištění nepoužívat přípravky s obsahem chloru a abrazivní čistící prostředky způsobující mechanické narušení povrchu.

Datum vytvoření návodu: 25.1.2012

Vyrobeno: HERDEGEN, Francie

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz

