

# NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO

# 100, 100 WHD



CE

## POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

## POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn ergonomickými výškově nastavitelnými rukojetmi, čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici. Chodítko je vybaveno bovdenovými brzdami s možností aretace, sedátkem, jídelním tácem a nákupním košíkem. Model WHD má zvýšenou nosnost a rozměry pro bariatrické pacienty s nadměrnou váhou.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho dodavatele.

Nepřekračujte maximální statickou nosnost chodítka 120 kg (model WHD 150 kg).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 105 kg (model WHD 135 kg).

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Při vstávání, opírání nebo posazování na chodítko vždy zaaretujte brzdy.

Při chůzi s chodítkem mějte ruce vždy připravené na pákách brzd.


Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte chodítko k sezení.

Chodítko není určeno pro transport a převoz sedících uživatelů.


## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítko s madly, jídelní tác, nákupní košík a 2 šrouby s křídlovou plastovou maticí k zajištění nastavení výšky madel.

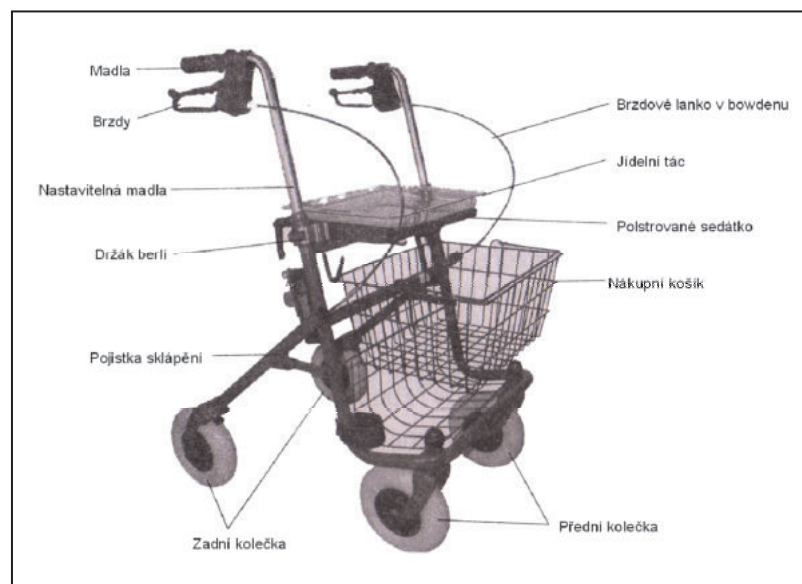


## SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA

Rozevřete rám chodítka a vyjměte zaslepovací ucpávky (A) z držáků výsuvných madel. Nainstalujte oba šrouby s křídlovou plastovou maticí (B-D) do držáku tak, jak je uvedeno na obrázku a nechte je povolené. Zasuňte obě madla do držáku, nastavte potřebnou výšku a šroubem s křídlovou plastovou maticí tuto pozici zaaretujte. Bowdenová lanka by měla vést zevně rámu!

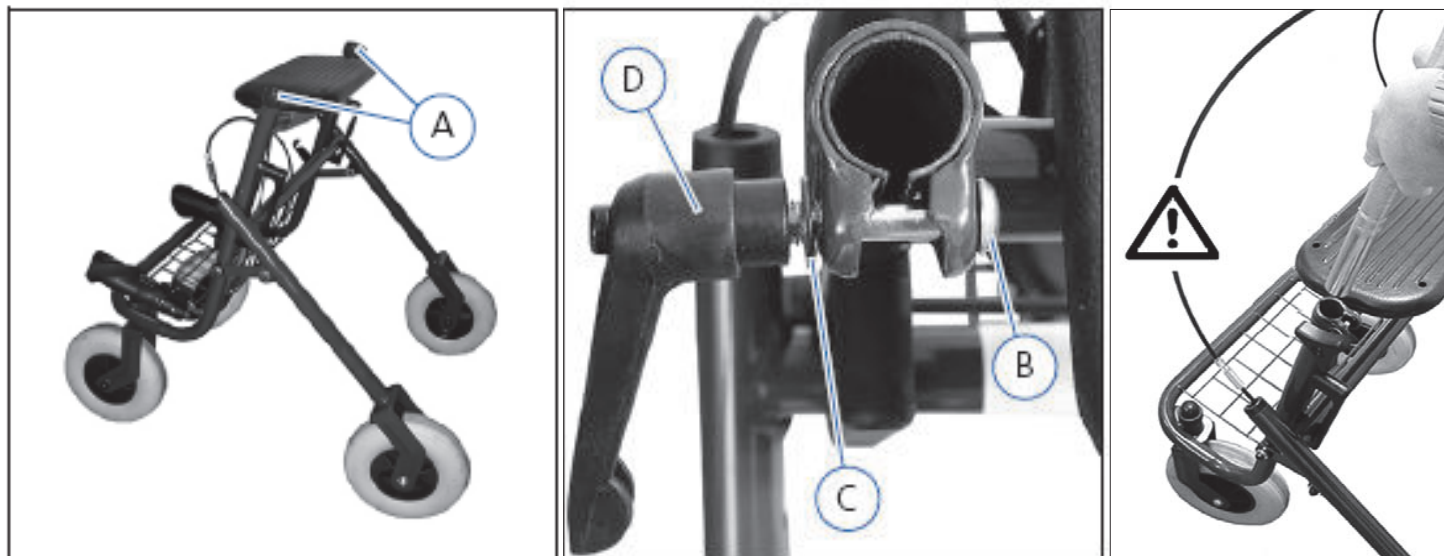


## BRZDY

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy (A) směrem nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačením páky brzdy směrem dolu, by se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Vždy používejte obě brzdy!

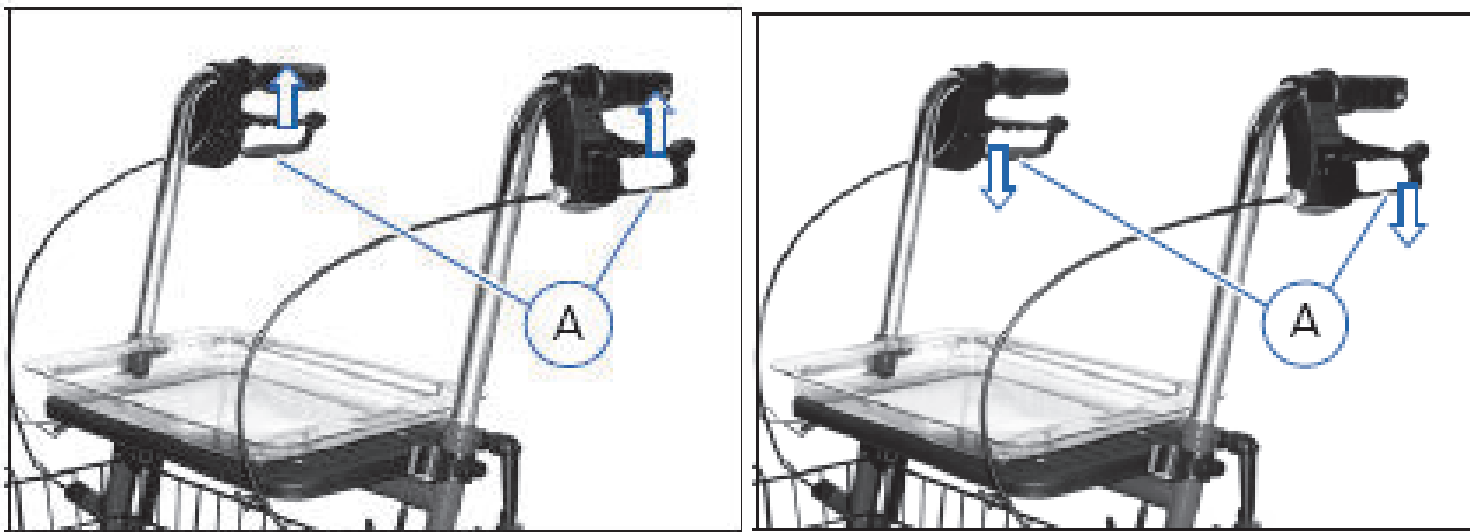


Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrzdění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídte brzdy pomocí šroubů bowdenového lanka.

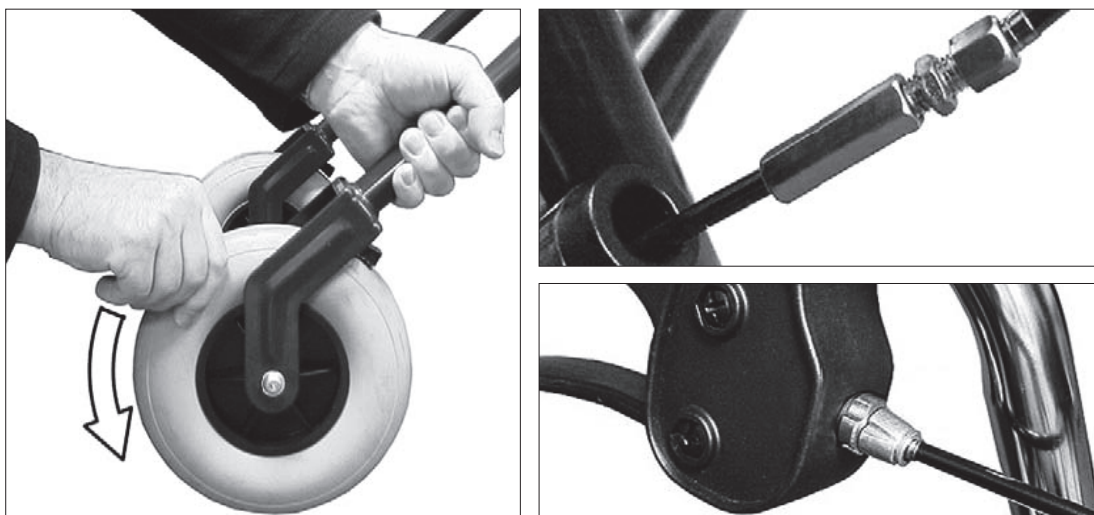

### TRANSPORTNÍ A SKLADOVACÍ POLOHA

Uvolněním aretační pojistky (C) a vytažením zadního rámu nahoru lze chodítko jednoduše složit do transportní polohy (A). Při rozložení postupujte opačným způsobem (A-C)

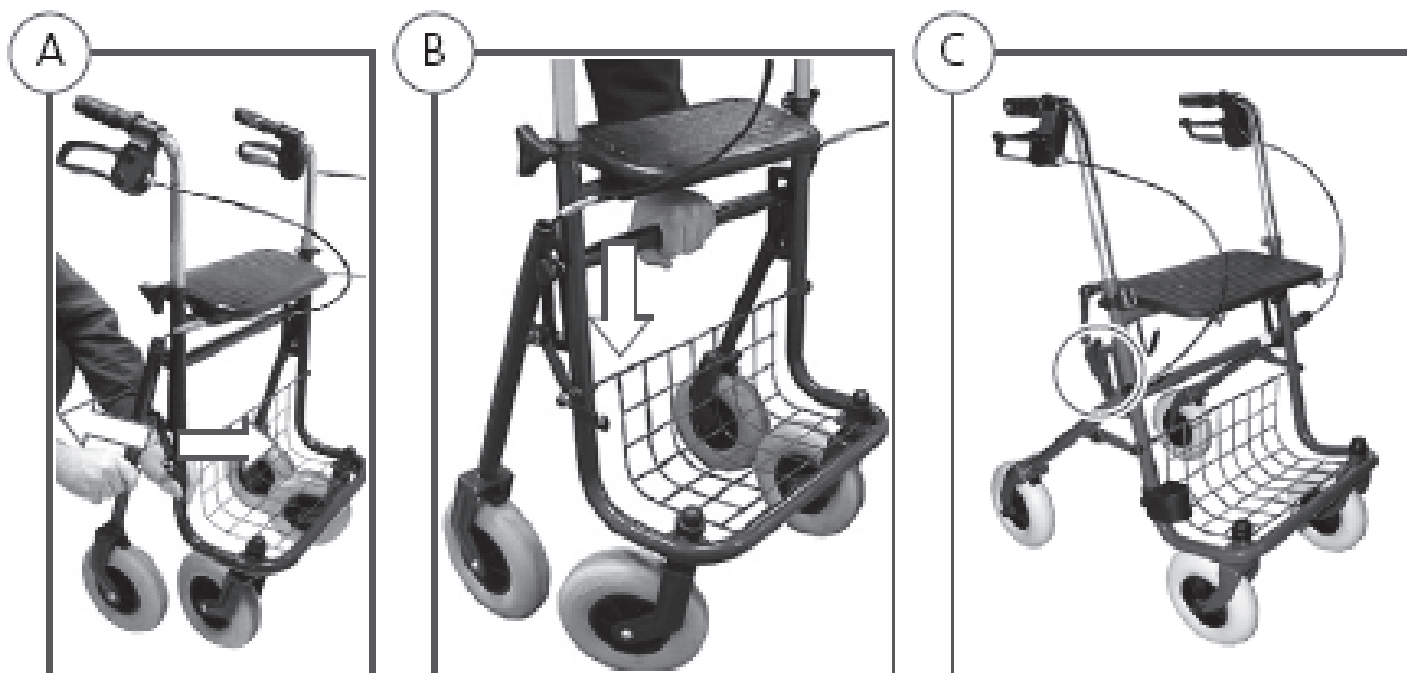

### ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bovdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

### SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.