

NÁVOD K POUŽITÍ

SKLÁDACÍ ČTYŘBODOVÉ CHODÍTKO

230, 230 EL, 233 EL



POUŽITÍ

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvič chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi výškově nastavitelnými nohami s protiskluzovými pryžovými nástavci. Typ 230 EL má navíc kloubovou vzpěru umožňující střídavé odlehčení bočního rámu na jedné straně a jeho následné předsunutí o krok vpřed, tzv. „krokování“, které Vám výrazným způsobem usnadní manipulaci a zajistí nácvič správného stereotypu chůze. Chodítka je vybaveno pojistkou sklápění a ergonomickými pěnovými rukojeťmi. Typ 230 je doplněn pomocnými rukojeťmi pro vstávání

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost a nastavení s ošetřujícím lékařem.

Chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 100 kg (viz výrobní štítek na produktu).


Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ CHODÍTKA


Chodítka rozložte rozevřením boků chodítka směrem od sebe až do polohy, kdy zapadne bezpečnostní pojistka (A), chráněná plastovou krytkou, umístěná na horní vzpěře chodítka. Pro složení chodítka zmáčkněte bezpečnostní pojistku (A) a tlačte boky chodítka směrem k sobě. Chodítka je výškově nastavitelné.

NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA

Pro nastavení výšky chodítka zamáčkněte z obou stran pojistku (B) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.

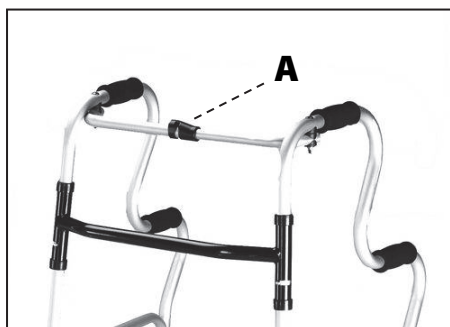

Bezpečnostní pojistka složení rámu.

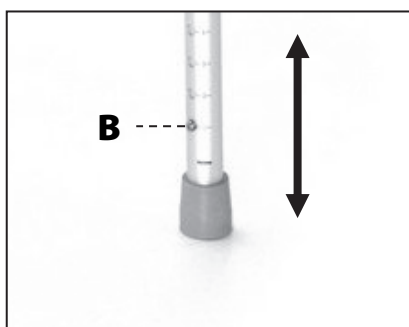

Pojistka k nastavení výšky rámu.



Krokový mechanismus
(230 EL)

ÚDRŽBA

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.