

NÁVOD K POUŽITÍ



CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ YOLA TGR-R RA 883



POUŽITÍ

Chodítka tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné rovněž k transportu drobných předmětů.

ÚVOD

Před použitím se ujistěte, že výrobek nevykazuje žádné poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy (viditelné a hmatatelné poškození, např. praskliny). Pokud tomu tak je, kontaktujte prosím prodejní místo. Poškozený výrobek nepoužívejte! Upozorňujeme, že při používání poškozeného výrobku může dojít k úrazu!

Důležité je, abyste si přečetli tuto příručku, která obsahuje důležité informace.


Máte-li dotazy ohledně používání výrobku, kontaktujte nás.

Rádi bychom také zdůraznili, že pokud si nejste jistí o vhodnosti používání této pomůcky vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

POPIS

Skládací odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených lakovaných duralových trubek vysoké pevnosti, a doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici. Má pohodlné ergonomické výškově nastavitelné rukojeti. Chodítko je vybaveno brzdami s možností aretace, sedátkem, opěrkou a příruční taškou.

- a. rukojeť
- b. brzda
- c. zvonek
- d. opěrka
- e. taška
- f. lanko brzdy
- g. aretační pojistka
- h. aretační šroub
- i. poutko pro složení sedátka
- j. držák berle
- k. spodní regulace brzdy

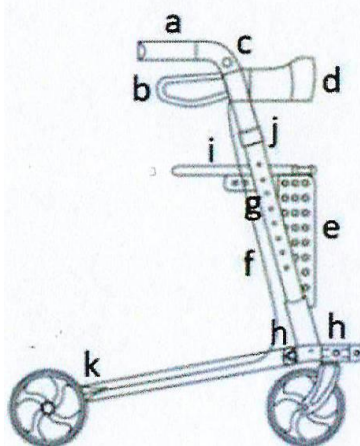

MONTÁŽ

Rozložení a složení chodítka

Nejdříve rozložte přední kola a zabezpečte je aretačními šrouby v montážních otvorech rámu. Pak rozložte zadní kola a rovněž zabezpečte aretačními šrouby.

Pro rozložení chodítka zatlačte na střed sedátka až do úplného rozložení a slyšitelného „cvaknutí“.

Tašku připevněte na přední stranu chodítka.

Před prvním použitím zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Pro složení chodítka zatáhněte směrem nahoru za poutko, které se nachází ve středu sedátka.

Upozornění: Buďte opatrní při skládání chodítka, aby nedošlo k přiskřípnutí prstů v závěsech!

Použití brzd

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd.

Pro zabrzdění chodítka stlačte páky brzd nahoru směrem k rukojeti. Silným stlačením páky brzdy směrem dolů, se brzdy zablokuje a zůstanou zabrzděné. Tento způsob zabrzdění použijte při postoji a při používání chodítka k sezení. Stlačením páky směrem nahoru brzdy odblokuje.

Upozornění: Vždy používejte obě brzdy najednou!

Nastavení výšky rukojeti

Rukojeti nastavte v takové výšce, aby uživatel chodítka stál na tolik ve vzpřímené poloze, na kolik mu to dovolí zdravotní stav, se svěšenými rameny, ruce lehce prohnuté v loktech. Nemělo by se opírat o chodítko celou váhou těla.

Výšku nastavte zatlačením na aretační pojistku na vnější straně rámu, nastavením požadované výšky a opětovným zacvaknutím aretačních pojistek.

Upozornění: Obě rukojeti nastavte na stejnou výšku!

Regulace brzd

Upozornění: Před prvním použitím zkontrolujte stav seřízení brzd!

Brzdy jsou seřízené ve výrobě. Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrzdění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídte brzdy pomocí šroubů bowdenového lanka.

Spodní regulace brzdy – povolte klíčem regulační šroub. Přidržte regulační šroub a dotáhněte upevňovací šroub. Zkontrolujte účinek brzd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Celková šířka: 64 cm

Celková hloubka: 69 cm

Rozměry sedáku: 46,5 x 26 cm

Výška sedáku od podlahy: 53,5 cm

Výška rukojeti od podlahy: 79,5-92,5 cm

Hmotnost: 7,6 kg

Nosnost: 130 kg

Nosnost tašky: 5 kg

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Chodítko smí používat pouze jedna osoba zároveň.
- Sedátko slouží pouze k dočasnému odpočinku.
- Před použitím sedátka je nutno zaaretovat brzdy.
- Není dovoleno používat sedátko k transportu.
- Při požití sedátko se není možné zaklánět. Může dojít k úrazu.
- Není dovoleno stoupat na chodítko.
- Taška slouží k přepravě lehkých a drobných předmětů.
- Nepřekračujte maximální zatížení (130 kg).
- Chodítko je určeno pro použití na rovném povrchu s max. sklonem 5%
- Není dovoleno požívat chodítko na mokřem, kluzkém anebo písčitém povrchu.
- Pro zachování bezpečnosti se doporučuje odstranit v bytě možné překážky, vysoké koberce, prahy, kluzké povrchy musí být chráněny, např. protiskluzovou rohoží.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi po nerovném chodníku a při zdolávání obručníků. S chodítkem necouvejte.
- Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy konstrukce. Veškeré opravy musí být provedeny kvalifikovaným servisem či výrobcem.
- Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků.
- Pro zachování dlouhé životnosti a vlastností produktu je nutné udržovat produkt v čistotě a dodržovat skladovací podmínky. Neskladujte při minusových teplotách, velmi vysoké vlhkosti (koupelny) a ve venkovních prostorech.

Upozornění: Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody či úrazy způsobené použitím výrobků v rozporu s touto instrukcí a účelem použití.

ÚDRŽBA

Nejméně jednou za 3 měsíce je nutno provést vizuální kontrolu všech jistících částí výrobku. Současně provést kontrolu:

- Brzd
- Spojovacích součástí (šrouby, pojistky)
- Regulace nastavení výšky madel
- Stability a vzhledu rámu (praskliny apod.)

Rám chodítka je potřeba pravidelně čistit navlhčeným hadrem a následně důkladně osušit. Není dovoleno používat abrazivní čisticí prostředky, způsobující mechanické narušení povrchu. Průběžně odstraňujte nečistoty z pohyblivých částí chodítka (kola, závěsy, brzdy).

ZÁRUKA A SERVIS

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem.

Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

Důležité upozornění: Firma Distrimed s.r.o., výhradní distributor výrobků značky Timago v ČR prohlašuje, že námi distribuované výrobky splňují veškeré normy platné v České republice. Tyto výrobky, určené pro ČR, se dají identifikovat dle výrobního čísla na výrobku, a jsou dodávány s návodem k použití, na kterém je uveden jako distributor firma Distrimed s.r.o. Výrobky, které byly do ČR dovezené jinou cestou, nemusí splňovat veškeré normy platné v ČR, a firma Distrimed s.r.o. nebude poskytovat na tyto výrobky záruční ani pozáruční servis.

Symbols

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zástupce v Evropské Unii
	Upozornění		Přečtěte si návod
	Výrobce provedl posouzení shody výrobku v souladu s požadavky směrnice EU pro zdravotnické prostředky.		

Datum poslední revize návodu: 15.3.2021

Výrobce: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko

Výhradní distributor: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz, www.distrimed.cz