

# NÁVOD K POUŽITÍ

## CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ TGR-R RA 885



## POUŽITÍ

Chodítka tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Zaručuje stabilitu a bezpečí při chůzi.

## ÚVOD

Před použitím se ujistěte, že výrobek nevykazuje žádné poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy (viditelné a hmatatelné poškození, např. praskliny). Pokud tomu tak je, kontaktujte prosím prodejní místo. Poškozený výrobek nepoužívejte! Upozorňujeme, že při používání poškozeného výrobku může dojít k úrazu!

Důležité je, abyste si přečetli tuto příručku, která obsahuje důležité informace.


Máte-li dotazy ohledně používání výrobku, kontaktujte nás.

Rádi bychom také zdůraznili, že pokud si nejste jisti o vhodnosti používání této pomůcky vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

## POPIS


Skládací odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených lakovaných duralových trubek vysoké pevnosti. Je doplněn čtyřmi plnými kolečky průměru 8", z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici. Má pohodlné ergonomické výškově nastavitelné rukojeti a polstrovaný sedák s regulací výškového nastavení. Chodítko je vybaveno brzdami s možností aretace, měkkou opěrkou a taškou.

- a. rukojeť
- b. brzda
- c. aretační šroub s plastovou hlavou (rukojeti)
- d. aretační pojistka (opěrky)
- e. opěrka
- f. sedák
- g. taška
- h. aretační pojistka (zadní kola)
- i. aretační klip (přední kola)
- j. držák berle
- k. horní regulace brzd
- l. spodní regulace brzd

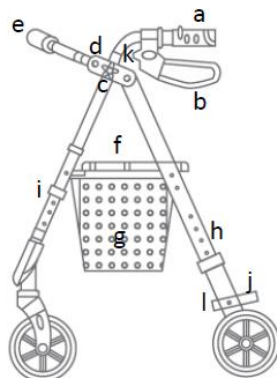

## OBSAH BALENÍ

- 1. Rám chodítka se sedátkem
- 2. Přední kola s rámem
- 3. Madla se zadními koly
- 4. Opěrka
- 5. Dva aretační šrouby s plastovou hlavou
- 6. Dva klipy (zacvaknuté na rámu)
- 7. Taška

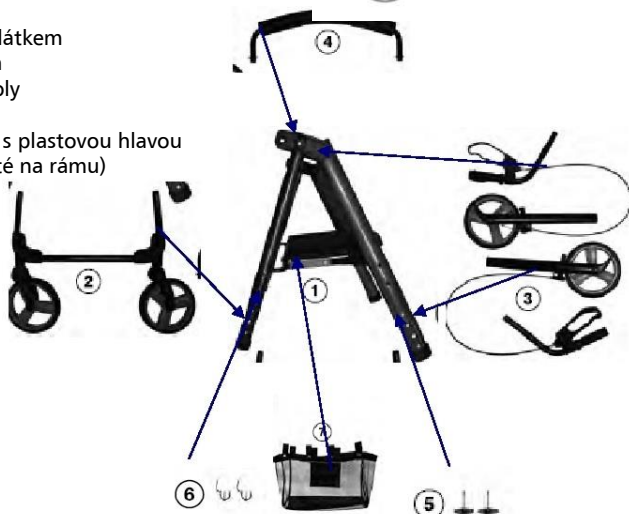

## MONTÁŽ

Postupujte dle obrázku Obsah balení.

1. Rám chodítka (1) rozložte roztáhnutím a zatlačením na sedák až do úplného rozložení.
2. Madla (3) jsou spojená brzdovými lanky se zadními koly. Vložte madla do otvorů ve vrchní části rámu, nastavte požadovanou výšku madel a zvolenou pozici zafixujte pomocí aretačních šroubů s plastovou hlavou (5), které prostrčíte otvory v rámu a madlech (c). Můžete zvolit jednu z pěti pozic (otvorů) dle požadované výšky madel, avšak u obou madel musíte nastavit stejnou výšku (zvolit stejný otvor).
3. Do otvorů ze spodní strany v zadní části rámu (1) vložte nohy se zadními koly (3). V rámu jsou z každé strany 4 otvory pro zvolení výšky sedáku. Zvolte požadovanou výšku a nechte zacvaknout aretační pojistku (h). U obou kol musíte zvolit stejnou výšku (stejný otvor).
4. Do otvorů ze spodní strany v přední části rámu (1) vložte rám s předními koly (2). V rámu jsou 4 otvory pro zvolení výšky sedáku. V nejvyšších otvorech (i) na obou stranách jsou vsunuté aretační klipy (6). Vyjměte je, zvolte požadovanou výšku, která musí být stejná, jako u zadních kol, prostrčte otvorem klipy a zacvakněte je.
5. Opěrku (4) nasadte na vrchní část rámu tak, aby zacvakly aretační pojistky (d).

## SLOŽENÍ

Pokud chcete chodítko složit např. pro transport autem, zvedněte sedák a zatáhněte za rám pod sedákem.

**Upozornění:** Buďte opatrní při skládání chodítka, aby nedošlo k přiskřípnutí prstů v závěsech!

## NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETÍ

Rukojeti nastavte v takové výšce, aby uživatel chodítka stál ve vzpřímené poloze, na tolik kolik mu to dovolí zdravotní stav, se svěšenými rameny, ruce lehce prohnuté v loktech. Nemělo by se opírat o chodítko celou váhou těla. Pro nastavení výšky rukojeti postupujte dle kapitoly MONTÁŽ bod 2.

## NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁKU

Pro nastavení výšky sedáku postupujte dle kapitoly MONTÁŽ bod 3 a 4 .

## POUŽITÍ BRZD

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd.

Pro zabrzdění chodítka stlačte páky brzd nahoru směrem k rukojeti. Silným stlačením páky brzdy směrem dolů, se brzdy zablokují a zůstanou zabrzděné v parkovací poloze. Tento způsob zabrzdění používejte při postoji a při používání chodítka k sezení. Stlačením páky směrem nahoru brzdy odblokujete.

**Upozornění:** Vždy používejte obě brzdy najednou!

## SEŘÍZENÍ BRZD

**Upozornění:** Před prvním použitím zkontrolujte stav seřízení brzd!

Brzdy jsou seřizené ve výrobě. Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrzdění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídte brzdy pomocí šroubů brzdového lanka.

Horní regulace brzdy – povolte připojení lanka, zatáhněte lanko na požadovanou vzdálenost a dotáhněte kontramatku.

Spodní regulace brzdy – povolte klíčem upevňovací šroub. Zatáhněte za černé lanko brzdy tak, aby jste zajistili napnutí lanka. Dotáhněte upevňovací šroub a zkontrolujte účinek brzd.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Celková šířka: 65 cm

Celková hloubka: 69 cm

Rozměry sedáku: 40 x 25,5 cm

Výška sedáku od podlahy: 54-62 cm

Výška rukojeti od podlahy: 90-100 cm

Rozměr kol: 20 cm (8")

Hmotnost: 6,8 kg

Celková nosnost: 130 kg

Nosnost tašky: 5 kg

## VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Chodítko smí používat pouze jedna osoba zároveň.
- Sedátko slouží pouze k dočasnému odpočinku.
- Před použitím sedátka je nutno zaaretovat brzdy.
- Není dovoleno používat sedátko k transportu.
- Při požití sedátka se není možné zaklánět. Může dojít k úrazu.
- Není dovoleno stoupat na chodítko.
- Taška slouží k přepravě lehkých a drobných předmětů. Nosnost je 5kg.
- Nepřekračujte maximální zatížení chodítka (130 kg).
- Chodítko je určeno pro použití na rovném povrchu s max. sklonem 5%
- Není dovoleno používat chodítko na mokrém, kluzkém anebo písčitém povrchu.
- Pro zachování bezpečnosti se doporučuje odstranit v bytě možné překážky, vysoké koberce, prahy, kluzké povrchy musí být chráněny, např. protiskluzovou rohoží.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi po nerovném chodníku a při zdolávání obrubníků. S chodítkem necouvejte.
- Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy konstrukce. Veškeré opravy musí být provedeny kvalifikovaným servisem či výrobcem.
- Pro zachování dlouhé životnosti a vlastností produktu je nutné udržovat produkt v čistotě a dodržovat skladovací podmínky. Neskladujte při minusových teplotách, velmi vysoké vlhkosti (koupelny) a ve venkovních prostorech.

**Upozornění:** Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody či úrazy způsobené použitím výrobků v rozporu s touto instrukcí a účelem použití.

## ÚDRŽBA

Nejméně jednou za 3 měsíce je nutno provést vizuální kontrolu všech jistících částí výrobku s důrazem na kontrolu:

- Brzd
- Spojovacích součástí (šrouby, klipy, aretační pojistky)
- Regulace nastavení výšky madel a sedáku
- Stability a vzhledu rámu (praskliny apod.)

Rám chodítka je potřeba pravidelně čistit navlhčeným hadrem a následně důkladně osušit. Není dovoleno používat abrazivní čisticí prostředky, způsobující mechanické narušení povrchu. Průběžně odstraňujte nečistoty z pohyblivých částí chodítka (kola, závěsy).

## ZÁRUKA A SERVIS

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

**Důležité upozornění:** Firma Distrimed s.r.o., výhradní distributor výrobků značky Timago v ČR prohlašuje, že námi distribuované výrobky splňují veškeré normy pro prodej v České republice. Tyto výrobky, určené pro ČR, se dají identifikovat dle výrobního čísla na výrobku, a jsou dodávány s návodem k použití, na kterém je uveden jako distributor firma Distrimed s.r.o. Výrobky, které byly do ČR dovezeny jinou cestou, nemusí splňovat výše uvedené požadavky, a firma Distrimed s.r.o. nebude poskytovat na tyto výrobky záruční ani pozáruční servis.

### Symbols

	Referenční číslo		Výrobce
	Sériové číslo		Datum výroby
	Číslo skupiny		Zástupce v Evropské Unii
	Poznámka		Prosím přečtěte si návod
	Oznáčení, že výrobce provedl posouzení shody výrobku v souladu s požadavky směrnice EU pro zdravotnické prostředky.		

Datum poslední revize návodu: 1.3.2020

Výrobce: Timago International Group Sp z o.o., Polsko  
Výhradní dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín,  
tel.: 558 711 827, [info@distrimed.cz](mailto:info@distrimed.cz), [www.distrimed.cz](http://www.distrimed.cz)