

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hliníkový invalidní vozík

Kód výrobku: TGR-R WA 6700




1. Provedení

Vozík má lehký hliníkový rám. Je vybaven měkkým odnímatelným opěradlem a sedadlem vyrobeným z materiálu, který zajišťuje dokonalou cirkulaci vzduchu. Nastavitelné područky jsou vyrobeny v profilované verzi se silně zkosenou hranou. Vozík má funkci rychlé demontáže kol, seřízení těžiště na předních kolech, brzdy pro doprovod, dělené opěradlo pro lepší přepravu. Vozík má zadní gumová plná kola 24" a přední plná kola o průměru 8". Balení obsahuje: rám vozíku, čalounění (sedadlo a opěradlo), levou a pravou podnožku, bezpečnostní popruh, pás pro uživatele, sadu klíčů.

Součásti vozíku:

- a. Rukojeti
- b. Brzda pro doprovod
- c. Pojistka dělení opěradla
- d. Područka
- e. Nastavení područky
- f. Parkovací brzda
- g. Hnací obruč
- h. Rychlospojka
- i. Páčka podnožky
- j. Nastavení těžiště
- k. Kola proti převrácení

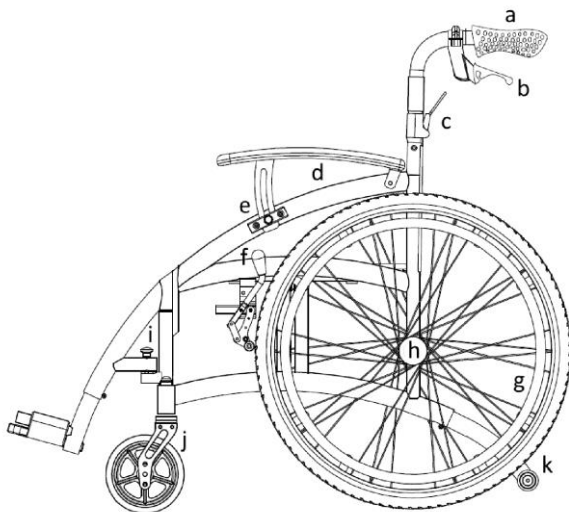

2. Použití

Hliníkový invalidní vozík je pomocné zařízení pro osoby, které mají problémy se samostatným pohybem a pro osoby se zdravotním postižením a omezením pohyblivosti. Je poháněn silou svalů rukou uživatele nebo tlačení doprovodnou osobou. Může se používat ve vnitřních i venkovních prostorech.

3. Montáž

Krok 1. Rozložení vozíku

Vozík postavte na rovný povrch. Rozložte jej pomocí područek. Pak zatlačte na okraj sedadla vpředu a vzadu tak, aby všechny části vozíku do sebe zapadly.

Krok 2. Opěradlo a sedadlo

Opěradlo zvedněte nahoru a zajistěte pojistkou umístěnou pod rukojeťmi pro doprovod. Pak natáhněte čalounění opěradla a sedadla a spodní část opěradla připevněte suchým zipem pod sedadlo.

Krok 3. Podnožky

Nejprve namontujte plastový držák podnožek na vnější stranu rámu vozíku, pak zasuněte upevňovací prvek podnožek do otvoru v přední části rámu a otočte podnožku dovnitř, dokud se nezajistí. Chcete-li vyklopit podnožku do strany, zvedněte páčku podnožky nahoru.

Krok 4. Područky

Područky jsou výškově nastavitelné pomocí kolíku umístěného na vnější straně područky.

Krok 4. Seřízení výšky podnožky

Seřídte postupně pravou a levou podnožku odšroubováním imbusového šroubu na trubce podnožky pomocí klíče. Nechte dostatečnou vzdálenost mezi stupačkami podnožek a zemí, protože příliš nízká poloha stupaček může způsobit potíže při jízdě s vozíkem přes překážky, jako je obrubník. Podnožky seřídte tak, aby úhel mezi trupem a stehny byl asi 90 ° (uživatel tak bude mít optimální polohu k sezení).

Krok 5. Bezpečnostní popruh

Bezpečnostní popruh připevněte v horní části podnožek. Tento popruh má chránit nohy uživatele proti sklouznutí ze stupaček pod vozík při jízdě.

OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ VOZÍKU

Vozík můžete opět složit pro snadší přepravu nebo uschování. Před složením rámu vozíku sklopte stupačky kolmo k povrchu, odepněte suchý zip opěradla umístěný pod sedadlem a pak pomocí rukojetí zvedněte sedadlo nahoru, dokud se rám vozíku nesklopí. Chcete-li složit opěradlo, stiskněte pojistku umístěnou pod rukojeťmi na zadní straně opěradla vozíku a zatlačte opěradlo dolů.

FUNKCE PARKOVACÍCH BRZD

- Chcete-li kola zajistit, posuňte brzdovou páčku dopředu, dokud není kolo zcela zablokováno (zvláště pro levé a pravé kolo). Pamatujte, že parkovací brzda se používá k zablokování kol pouze při stání.

FUNKCE DĚLENÉHO OPĚRADLA

- Chcete-li sklopit opěradlo, stiskněte současně pojistky umístěné pod rukojeťmi na zadní straně opěradla vozíku a zatlačte opěradlo dolů.

FUNKCE POMOCNÝCH BRZD (PRO DOPROVOD)

- Brzdové páčky jsou umístěny za opěradlem, u pravé a levé rukojeti vozíku, a jsou spojeny lankem s páčkou ruční brzdy u kol.
- Chcete-li zabrzdit, uchopte brzdovou páčku a stlačte ji, pro uvolnění pusťte. Tuto činnost provádějte plynule s vhodně zvolenou silou.
- Brzdy mají parkovací zámek. Uchopte brzdovou páčku, stiskněte ji a zatáhněte za zajišťovací prvek (umístěný u brzdové páčky).

SEŘÍZENÍ PARKOVACÍCH BRZD

Správné zablokování parkovací brzdy závisí na jejím seřízení a nastavení. Brzda musí být seřizena tak, aby brzdová čelist jistě blokovala kolo a aby páčka nekladla nadměrný odpor.

- V případě nadměrného odporu lehce vysuňte dřík brzdy směrem dopředu odšroubováním zajišťovacího šroubu na druhé straně brzdy (z vnější strany vozíku) a nastavte do polohy, aby brzda snadno a bez odporu blokovala kolo.
- Pokud se brzdová čelist nedotýká celá kola a dostatečně ji neblokuje, postupujte výše uvedeným způsobem, posuňte dřík brzdy v opačném směru.

ČINNOSTI PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Krok 1. Kontrola stavu vozíku

Zkontrolujte funkčnost brzd, stav konstrukce a pneumatik. Věnujte také pozornost řádnému namontování prvků a jejich správnému seřízení.

Pozor! Nepoužívejte vozík, pokud bude mít jakékoli závady nebo nebude kompletní.

Krok 2. Zatažení parkovací brzdy

Před nasednutím a sesednutím z vozíku zatáhněte parkovací brzdou.

Krok 3. Nastavení podnožek

V okamžiku nasedání na vozík a sesedání z něj musí být stupačky nastaveny svisle. Stupačky nepoužívejte k podepření při nasedání a sesedání vzhledem k riziku naklonění vozíku a pádu.

Pozor! Nestávejte na stupačky, protože se mohou poškodit.

Krok 4. Nastavení kol

Přední kola by měla směřovat ve směru jízdy.

Krok 5. Nasednutí na vozík

Vozík umístěte co nejbližší k místu přesednutí tak, aby se dotýkal postele nebo jiného používaného sedadla zadním kolem a přední části rámu. Pokud uživatel nemůže sám přesednout, přeneste jej na vozík.

Krok 6. Rozložení podnožek

Když je uživatel již na vozíku, rozložte stupačky rovnoběžně se zemí tak, aby uživatel

při používání vozíku měl nohy na stupačkách.

Krok 7. Vhodná poloha uživatele

Uživatel by měl sedět ve vzpřímené poloze s koleny ohnutými v úhlu 90 °.

Vozík je připraven k použití.

4. Technická specifikace

Celková šířka	67 cm
Vnitřní šířka	46 cm
Celková hloubka	106 cm
Výška sedadla od země	50 cm
Celková výška	91 cm
Rozměry sedadla	45 x 41 cm
Hmotnost	13,7 kg
Max. zatížení	115 kg
Šířka po složení	34 cm
Barva rámu	červený

5. Poznámky a doporučení

Timago International Group neodpovídá za nesprávné pohybování se na vozíku, nedodržování zásad bezpečnosti a za používání v rozporu s určením.

5. Údržba

Pravidelně provádějte údržbu součástí vozíku:

- Čalounění a polštář čistěte studenou nebo teplou vodou a vlhkým (nikoli mokrým) hadříkem bez použití čisticích prostředků. Úpornější skvrny čistěte houbou. Při údržbě čalounění dávejte pozor, abyste jej příliš nenamáčeli. Sušte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
- Plastové díly čistěte vlhkým hadříkem, eventuálně čisticím prostředkem na plast. Při tom postupujte podle návodu výrobce a zásad bezpečnosti při používání čisticích prostředků.

6. Informace o záruce

Na všechny výrobky distribuované naší firmou se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi při nákupu. Chtěli bychom také upozornit

na to, že pro záruční nároky je třeba uschovat doklad o nákupu (paragon nebo faktura).

7. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo série		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Poznámka		Seznamte se s pokyny
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celá nabídka je pro vás dostupná u našich distributorů. Více se můžete dozvědět na www.timago.com.

Děkujeme vám, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka - Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Vydání II., datum aktualizace 29.03.2021