

Nástavec na WC Contact Plus

CZ – Komfortní nástavec zvyšující posed na WC mísu

Komfortní nástavec na WC mísu CONTACT PLUS® NÉO slouží ke zvýšení komfortu používání toalety osobám s omezenou pohyblivostí, obzvláště těm, s nemocemi v oblasti kyčlí. Zvyšuje posed o 11 cm a usnadňuje sedání a vstávání z toalety.

COMFORT PLUS® NÉO zajišťuje komfort díky provedení z elastického materiálu vyplněného pěnou, která je dost tuhá, aby zajistila podporu a přes to měkká, díky čemuž je obzvláště doporučován pro osoby s vyšším rizikem tvorby dekubitů.

Speciální konstrukce s dvojitou záložkou zajišťuje jednoduchou a rychlou montáž na téměř každé WC míse. Projektant nezapomenul také o intimní hygieně – speciální profilování v přední části zajišťuje dostatečný přístup. Pružný materiál těsně pokrývající pěnu zaručuje hygienu a jednoduché čištění nástavce.

Maximální hmotnost uživatele: 185 kg

CZ – Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné pozdější použití.

1. Bezpečnostní varování

- VŽDY se poraďte se svým lékařem nebo dodavatelem, abyste zjistili správné nastavení a použití zařízení.
- Neskladujte venku a nenechávejte na slunci (POZOR: nenechávejte zařízení v autě v případě vysokých venkovních teplot!!!).
- Nepoužívejte v extrémních teplotách (nad 38°C nebo pod 0°C).
- Nepoužívejte produkt venku – je určen pouze pro použití uvnitř budov na standardní WC míse.
- Pečlivě kontrolujte stav spojovacích částí produktu (poklop, panty...).
- Používejte pouze v souladu s určením a správným způsobem: nestávejte na výrobek, nesedejte při zavřeném poklopu.
- VŽDY dodržujte hmotnostní limit uvedený na štítku výrobku anebo v návodu k použití.
- Pro vlastní bezpečnost neprovádějte na tomto zařízení žádné změny anebo úpravy. Poškozené nebo vadné díly vyměňte pouze za originální díly a nechte to provést technickým personálem.
- Po nasazení produktu na WC mísu před použitím se ujistěte, že je nasazen bezpečně a je stabilní.
- Nezavěšujte nic na produkt.
- Pokud jste produkt neužívali dlouhou dobu, nechte ho před použitím zkontrolovat technickým personálem.
- Vždy před použitím zkontrolujte stabilitu produktu.
- Během používání se nenaklánějte do stran, vyhněte se riziku ztráty rovnováhy a pádu.
- Nedovolte dětem, aby si s produktem hrály.
- Všechny nežádoucí účinky a nehody spojené s používáním produktu, by měly být hlášeny dodavateli a kompetentním státním úřadům, které vykonávají dozor v oblasti zdravotnických prostředků.

2. Indikace a kontraindikace

Nástavec slouží ke zvýšení posedu na WC míse do komfortní výšky, která usnadňuje samostatné použití toalety. Výrobek pomáhá zachovat soukromí a nezávislost ve vykonávání fyziologických potřeb osobám s omezenou mobilitou, jak v domácích, tak i v ošetrovatelských podmínkách.

Indikace:

Pro osoby, které mají problémy s mobilitou, udržením rovnováhy, problémy při sedání a vstávání z WC mísy, oslabení bederního kloubu, po operacích bederních kloubů.

Kontraindikace:

Kognitivní porucha, poruchy rovnováhy, spasticita.

Půjčovna:

Produkt může být zapůjčován za předpokladu správného čištění a dezinfekce. Tento návod je nedílnou součástí výrobku a musí být předán každému dalšímu uživateli.

3. Používání:

Pouze specialista je by měl přizpůsobit výrobek vašim individuálním potřebám a naučit vás ho používat. Nesprávné nastavení anebo používání mohou způsobit přetížení zařízení anebo mít negativní vliv na vaše zdraví.

Zeptejte se specialisty jak používat produkt a ujistěte se, že všemu rozumíte. V případě nejistoty se neváhejte zeptat znovu.

- 1 – Zvedněte poklop WC mísy
- 2 – Nasadte nástavec na WC mísu až na doraz
- 3 – Ujistěte se, že límec nástavce obepíná z obou stran hranu mísy
- 4 – Před usednutím zkontrolujte stabilitu
- 5 – Pro sejmutí nástavce jej stačí zatáhnout směrem nahoru

4. Čištění

Výrobek čistěte pravidelně při použití šetrných čistících prostředků, vody s mýdlem a měkkého hadříku.

NIKDY nepoužívejte mastné a olejové látky – riziko uklouznutí a pádu!

K dezinfekci používejte šetrné bezchlórové prostředky, jako například Surfanios (Anios laboratoires).

NEPOUŽÍVEJTE abrazivní prostředky ani vysokotlaké čističe – riziko poškození výrobku.

Možno sterilizovat v autoklávu: 90°C, vlhkost 80%, doba 5 minut.

K opravám používat výhradně správné nářadí a originální náhradní díly. Tento návod je nedílnou součástí výrobku a musí být předán každému dalšímu uživateli.

5. Materiály

Produkt je vyroben z pěny s vysokou hustotou, vstřikované do voděodolné formy z PVC.

6. Likvidace

Zlikvidujte tento produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.

7. Technické specifikace

Výrobek má 2letou záruční dobu od data zakoupení na výrobní a materiálové vady.

Předpokládaná životnost: 2 roky.

Výrobek je biokompatibilní.

Test: DIN EN-ISO999 (08/98).

			
1	2	3	4
CZ			
Vysvětlení symbolů			
1	Zdravotnický prostředek		
2	Před použitím si přečtete návod k obsluze		
3	Dodržujte bezpečnostní pokyny		
4	Certifikát CE		