

Úplná technická specifikace:

PARAMETR:	AR-201	AR-201A	AR-202	AR-203	AR-204	AR-205	AR-208	AR-209
Rám:	duralový	duralový	duralový	duralový	ocelový	duralový	duralový	duralový
Barva rámu:	stříbrná	stříbrno / šedá	stříbrná	stříbrná	bílá	stříbrná	stříbrná	stříbrná
Typ / model:	pevný	pevný	pevný	pevný	skládací	skládací	pevný	pevný
Šířka sedáku:	33cm kulatý	33cm kulatý	50cm	50cm	50cm	50cm	48cm	41cm
Hloubka sedáku:	33cm kulatý	33cm kulatý	30cm	30cm	30cm	30cm	33cm	48cm
Výškové nastavení:	38-56cm	37-52cm	36-47cm	36cm-47cm	52cm	47-50,5cm	36cm-53cm	35cm-45cm
Hmotnost produktu:	1,5kg	1,9kg	1,8kg	3,0kg	3,2kg	2,4cm	2,7kg	2,1kg
Maximální zatížení:	110kg	110kg	110kg	110kg	110kg	110kg	110kg	110kg

ZÁRUKA A SERVIS

- 1) Záruku na tento produkt, zakoupený na území České republiky, zajišťuje firma Distrimed s.r.o. - distributor výrobků značky ARMEDICAL S.C. v ČR.
- 2) Pokud se zjistíte, že produkt nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce, kde byl nákup proveden, nebo firmu Distrimed s.r.o., tel.: 558 712 577, reklamace@distrimed.cz. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Distrimed – sklad, reklamace, Trinec Kanská, čp. 601, PSČ: 739 61
- 3) Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé mechanickým poškozením (oděrky rámu), poškození vlivem opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, tj. například ořezu pryžových násadců, polyethylenových prvků.
- 4) Záruka zaniká při jakékoliv konstrukční úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem.
- 5) Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a skladování a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí, a také při překročení uživatelem maximální nosnosti stanovené výrobcem.

Datum vytvoření návodu: 30.12.2019

Distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz, www.distrimed.cz

ARmedical®
HomeCare Line

NÁVOD K POUŽITÍ**SEDAČKY DO SPRCHY**


AR-202 Sedačka bez opěrky
AR-203 Sedačka s opěrkou
AR-208 Sedačka s opěrkou a výřezem U
AR-201A Sedačka kulatá otočná

AR-201 Sedačka kulatá
AR-204 Sedačka skládací ocelová
AR-205 Sedačka skládací duralová
AR-209 Sedačka s výřezem U



ARMEDICAL S.C.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl



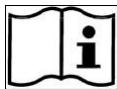

NÁVOD K POUŽITÍ – SADAČKY DO SPRCHY

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste do nás vložili. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom zajistili, že náš výrobek splní Vaše očekávání. Věříme, že bude významnou pomocí při každodenních toaletních činnostech. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití, je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy. Uchovejte prosím tuto příručku.

Účel použití:

Sprchové sedačky jsou určeny zdravotně postiženým osobám s poruchami pohybového aparátu, starším osobám a osobám, u kterých je ze zdravotních důvodů problém používání vany nebo sprchy běžným způsobem. Usnadňují a pomáhají při každodenních hygienických činnostech v koupelně, vaně, nebo sprchovém koutě.

Technická specifikace:

Maximální hmotnost uživatele zajišťující bezpečné používání produktu – **110 kg**

⚠ Varování a doporučení:

Abyste se vyhnuli nehodě, prosíme o:

- 1) Kontrolu, zda jsou všechny trubky rovné, bez prasklin (např. během přepravy), zda obal obsahuje všechny součásti produktu.
- 2) Kontrolu, zda všechny prvky vyrobené z polyethylenu nemají žádné poškození, např. praskliny.
- 3) Kontrolu, zda jsou všechny nohy sedačky nastaveny na stejnou výšku. Týká se modelů: AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209.
- 4) Kontrolu, zda jsou na všech nohách gumové násadce a zda jsou všechny správně upevněné.

⚠ Abyste předešli zranění:

- 1) Všechny prvky vyrobené z polyethylenu musí být pevně a trvale spojené (pomocí přiložených šroubů) s nohama a opěradlem (týká se modelu AR-203, AR-208)
- 2) Před použitím je nutné vždy zkontrolovat technický stav a stabilitu produktu (kontrola všech upevňovacích prvků, sedáku, trubek rámu, pryžových násadců).
- 3) Všechny nohy sprchové sedačky musí být nastaveny na stejnou výšku. Týká se modelů: AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209.
- 4) Používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu, který zabraňuje pohybu židle při sedání.
- 5) Dbejte zvláštní opatrnosti při použití na mokřím nebo kluzkém povrchu.
- 6) Je zakázáno razantní sedání na sedačku (např. naskakování).
- 7) Je zakázáno přenášet sedačku s uživatelem.
- 8) Je zakázáno stávání na sedadlo a jakoukoli část výrobku.
- 9) Toaletní křeslo nepřetěžujte, nepřekračujte maximální zatížení stanovené výrobcem.
- 10) Před použitím se doporučuje, aby kluzké povrchy byly vybaveny protiskluzovými rohožemi (např. sprchový kout).

Pokyny k údržbě:

Po každém použití sedačky by měl být produkt důkladně opláchnutý čistou vodou (nenechávejte na výrobku mýdlo, šampon, sprchový gel atd.). Poté důkladně vysušte měkým hadříkem. K čištění je zakázáno používat silné a abrazivní čisticí prostředky, benzín a rozpouštědla. Skladování v místnostech s vysokou vlhkostí (např. sklep), v kombinaci s nedostatkem důkladné údržby produktu (hygiena, sušení) povede ke ztrátě funkčních a estetických parametrů sedačky a tím ke ztrátě záruky. Protiskluzové gumové násadce (5) jsou opotřebitelné a musí být pravidelně vyměňovány za nové.

Odstraňování problémů:

Pokud narazíte na problémy, přečtěte si prosím tuto kapitolu. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejní místo nebo servis. Opravovat sprchovou sedačku svépomocí **JE ZAKÁZÁNO!!!**

Může to způsobit nehodu.

Sprchová sedačka je nestabilní.

- a) Jsou všechny nohy sedačky ve stejné výšce? Pokud ne, nastavte je správně.
- b) Mají všechny nohy gumové násadce (5)? Pokud ne, nasadte je.
- c) Jsou všechny gumové násadce (5) správně nasazený? Pokud ne, nasuňte / nasadte je správně.
- d) Má produkt pevně přišroubované polyetylenové komponenty k rámu (1) (pomocí přiložených šroubů)? Pokud tomu tak není, dotáhněte všechny šrouby pevně. Všechny prvky produktů by měly být sešroubovány / smontovány tak, aby po dokončení operací vypadaly přesně tak, jak je znázorněno na fotografii produktu ze strany 1.
- e) I přes pevné utažení všech upevňovacích šroubů není produkt stále stabilní? Pokud ne, kontaktujte místo nákupu. **NEPOUŽÍVEJTE SEDAČKU !!!**

POPIS



Příprava k použití:

- 1) Vyměňte sedačku z kartonu nebo z fóliového obalu. Výrobek je nitro před prvním použitím smontovat.
- 2) Nejprve zkontrolujte technický stav produktu v souladu s odstavcem **Varování a doporučení.**
- 3) Položte sedadlo (2) na podlahu nebo tvrdý povrch tak, aby byla viditelná spodní strana. Uchopte prvky hliníkového rámu (1) (ocelového pro AR-204) a držte je gumovými násadci (5) nahoru tak, aby se otvory v rámu a sedadle shodovaly (překrývaly). Pomocí šroubováku zašroubujte všechny přiložené šrouby do existujících otvorů. U modelu AR-203, AR-208: po smontování sedadla a hliníkového rámu (noh) přišroubujte opěradlo (3). Postupujte stejně jako při montáži sedadla a hliníkového rámu.

UPOZORNĚNÍ! Všechny šrouby musí být řádně dotaženy k zajištění bezpečného používání produktu.

- 4) Nastavte výšku noh (týká se modelů: AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209) dle potřeb uživatele. Chcete-li to provést, stiskněte západku (4) na noze, čímž se uvolní zámek. Nastavte požadovanou výšku zasunutím nebo vysunutím trubky nohy. Západka **musí** skočit do otvoru v požadované výšce! Opakujte pro všechny nohy. **UPOZORNĚNÍ!** Západka na všech nohách musí být ve stejné výšce.

Ohledně vhodností používání sedačky s ohledem na zdravotní stav uživatele se případně poraďte se svým lékařem anebo fyzioterapeutem.

Ukončení používání:

1. Složte sedačku – týká se modelů AR-204, AR-205

Čištění a skladování:

1. Umístěte toaletní křeslo na místo, kde nebude vystaveno mechanickému poškození, vlhkosti, mrazu, slunečnímu záření anebo tepelným zdrojům.
2. V případě znečištění postupujte podle odstavce „Pokyny k údržbě“ této příručky.

DĚKUJEME ZA VÝBĚR A ZAKOUPENÍ NAŠEHO PRODUKTU