

Úplná technická specifikace:

PARAMETR:	AR-210
Rám:	duralový
Barva rámu:	stříbrná
Typ / model:	pevný
Šířka sedáku:	41cm
Hloubka sedáku:	21,5cm
Výškové nastavení:	21 – 26cm
Hmotnost produktu:	1,7kg
Maximální zatížení:	160kg

ZÁRUKA A SERVIS

- 1) Záruku na tento produkt, zakoupený na území České republiky, zajišťuje firma Distrimed s.r.o. - distributor výrobků značky ARMEDICAL S.C. v ČR.
- 2) Pokud se zjistíte, že produkt nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce, kde byl nákup proveden, nebo firmu Distrimed s.r.o., tel.: 558 712 577, reklamace@distrimed.cz. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Distrimed – sklad, reklamace, Trinec Kinská, čp. 601, PSČ: 739 61
- 3) Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé mechanickým poškozením (oděrky rámu), poškození vlivem opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, tj. například otěru pryžových násadců, polyethylenových prvků.
- 4) Záruka zaniká při jakékoliv konstrukční úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem.
- 5) Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a skladování a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí, a také při překročení uživatelem maximální nosnosti stanovené výrobcem.

Datum revize návodu: 14.6.2021

Distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz, www.distrimed.cz

ARmedical[®]
HomeCare Line

NÁVOD K POUŽITÍ

STUPÍNEK – SEDAČKA DO VANY

Model: AR-210




ARM AR-210



ARMEDICAL S.C.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel./fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl



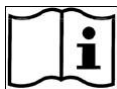

NÁVOD K POUŽITÍ – STUPÍNEK - SADAČKA DO VANY

Vážení zákazníci, děkujeme za nákup našeho produktu, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste do nás vložili. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom zajistili, že náš výrobek splní Vaše očekávání. Věříme, že bude významnou pomocí při každodenních toaletních činnostech. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití, je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy. Uchovejte prosím tuto příručku.

Účel použití:

Stupínek - sedačka jsou určená zdravotně postiženým osobám s poruchami pohybového aparátu, starším osobám a osobám, u kterých je ze zdravotních důvodů problém používání vany nebo sprchy běžným způsobem. Usnadňují a pomáhají při každodenních hygienických činnostech v koupelně, vaně, nebo sprchovém koutě.

Technická specifikace:

Maximální hmotnost uživatele zajišťující bezpečné používání produktu – **160 kg**

⚠ Varování a doporučení:

Abyste se vyhnuli nehodě, prosíme o:

- 1) Kontrolu, zda jsou všechny trubky rovné, bez prasklin (např. během přepravy), zda obal obsahuje všechny součásti produktu.
- 2) Kontrolu, zda sedák/stupínek z polyethylenu nemá žádné poškození, např. praskliny.
- 3) Kontrolu, zda jsou všechny nohy sedačky nastaveny na stejnou výšku.
- 4) Kontrolu, zda jsou na všech nohách gumové násadce a zda jsou všechny správně upevněné.

⚠ Abyste předešli zranění:

- 1) Sedák/stupínek z polyethylenu musí být pevně a trvale spojen (pomocí přiložených šroubů (5)) s duralovým rámem.
- 2) Před použitím je nutné vždy zkontrolovat technický stav a stabilitu produktu (kontrola všech upevňovacích prvků, sedáku, trubek rámu, pryžových násadců).
- 3) Všechny nohy stupínku/sedačky musí být nastaveny na stejnou výšku.
- 4) Používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu, který zabraňuje pohybu stupínku/sedačky.
- 5) Dbejte zvláštní opatrnosti při použití na mokřem nebo klzkém povrchu.
- 6) Je zakázáno razantní sedání na sedačku (např. naskakování).
- 7) Je zakázáno přenášet stupínek/sedačku s uživatelem.
- 8) Výrobek nepřetěžujte, nepřekračujte maximální zatížení stanovené výrobcem.
- 9) Buďte obzvláště opatrní při stoupání na stupínek po ukončení toaletních činností (např. vystupování z vany). Povrch stupínku/sedačky může být velmi klzký (voda, zbytky mýdla anebo jiných mycích přípravků). RAZANTNÍ NAŠLÁPNUTÍ MŮŽE ZPŮSOBIT NEHODU!

Pokyny k údržbě:

Po každém použití by měl být produkt důkladně opláchnutý čistou vodou (nenechávejte na výrobku zbytky mýdla, šamponu, sprchového gelu atd.). Poté důkladně vysušte měkkým hadříkem. K čištění je zakázáno používat silné a abrazivní čisticí prostředky, benzin a rozpouštědla. Skladování v místnostech s vysokou vlhkostí (např. sklep), v kombinaci s nedostatkem důkladné údržby produktu (hygiena, sušení) povede ke ztrátě funkčních a estetických parametrů výrobku a tím ke ztrátě záruky. Protiskluzové gumové násadce (4) jsou opotřebitelné a musí být pravidelně vyměňovány za nové.

Odstraňování problémů:

Pokud narazíte na problémy, přečtěte si prosím tuto kapitolu. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejní místo nebo servis. Opravovat sprchovou výrobek svépomocí **JE ZAKÁZÁNO!!!**
Může to způsobit nehodu.

Stupínek - sedačka je nestabilní.

- a) Jsou všechny nohy stupínku/sedačky ve stejné výšce? Pokud ne, nastavte je správně.
- b) Mají všechny nohy gumové násadce (4)? Pokud ne, nasadte je.
- c) Jsou všechny gumové násadce (4) správně nasazeny? Pokud ne, nasuňte / nasadte je správně.
- d) Má produkt pevně přišroubovaný polyetylenový stupínek/sedák k rámu (2) pomocí přiložených šroubů (5)? Pokud tomu tak není, dotáhněte všechny šrouby pevně. Všechny prvky produktů by měly být sešroubovány / smontovány tak, aby po dokončení operací vypadaly přesně tak, jak je znázorněno na fotografii produktu na straně 1.
- e) I přes pevné utažení všech upevňovacích šroubů (5) není produkt stále stabilní? Pokud není, kontaktujte místo nákupu. **NEPOUŽÍVEJTE STUPÍNEK / SEDAČKU !!!**

POPIŠ



Příprava k použití:

- 1) Vyjměte sedačku z kartonu nebo z fóliového obalu. Výrobek je nitro před prvním použitím smontovat.
- 2) Nejdříve zkontrolujte technický stav produktu v souladu s odstavcem **Varování a doporučení**.
- 3) Položte sedák/stupínek (1) na podlahu nebo tvrdý povrch tak, aby byla viditelná spodní strana. Uchopte prvky hliníkového rámu (5) a držte je gumovými násadci (4) nahoru tak, aby se otvory v rámu a sedáku/stupínku shodovaly (překrývaly). Zašroubujte všechny přiložené šrouby do existujících otvorů.
- UPOZORNĚNÍ! Všechny šrouby musí být řádně dotaženy k zajištění bezpečného používání produktu.**
- 4) Nastavte výšku noh dle potřeb uživatele. Chcete-li to provést, stiskněte pojistnou západku (3) na noze, čímž se uvolní zámek. Nastavte požadovanou výšku zasunutím nebo vysunutím trubky nohy. Západka **musí** skočit do otvoru v požadované výšce! Opakujte pro všechny nohy. **UPOZORNĚNÍ!** Západka na všech nohách musí být ve stejné výšce.

Ohledně vhodnosti používání stupínku - sedačky s ohledem na zdravotní stav uživatele se případně poraďte se svým lékařem anebo fyzioterapeutem.

Ukončení používání:

1. Složte sedačku – týká se modelů AR-204, AR-205

Čištění a skladování:

1. Umístěte sedačku - stupínek na místo, kde nebude vystaven mechanickému poškození. Výrobek může také zůstat stát u vany, pokud nehrozí riziko zakopnutí při pohybu po koupelně.
2. V případě znečištění postupujte podle odstavce „Pokyny k údržbě“ této příručky.

DĚKUJEME ZA VÝBĚR A ZAKOUPENÍ NAŠEHO PRODUKTU