



NÁVOD K POUŽITÍ

Toaletní křeslo NEW CLUB

AST 320 023 – modré

AST 320 011 – šedé

Použití

Toaletní křeslo je kompenzační pomůckou, které uživateli usnadňuje provádět fyziologické činnosti.

Popis

Křeslo je vyrobeno z pevného kovu natřeného epoxidovým povlakem a nepromokavého čalounění. Vybaveno vyjmutelnou plastovou toaletní nádobou s víkem. Sedadlo lze odstranit – usnadňuje to čištění a dezinfekci křesla. Otvor sedadla lze zakrýt víkem.

Používání

Umístěte nádobu na vyhrazené úchyty pod sedadlem. Lze to udělat seshora, po zvednutí sedátka dozadu, poté otočit na dvou plastových úchytech připevněných ke kovové konstrukci křesla.

Buďte opatrní při vyndávání nádoby, aby se zabránilo kontaktu s genitáliemi.

Nepřekračujte maximální nosnost křesla!

Údržba

Toaletní křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a chlór a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po vyčištění vysušit. Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte nádobu. Používejte čistící prostředky na toalety podle doporučení výrobce.

Technické informace

Hmotnost	6.8 kg
Celková šířka	61 cm
Celková výška	86 cm
Celková hloubka	49 cm
Vnitřní šířka	46 cm
Rozměry sedáku	44 x 40 cm
Výška zádové opěrky	46 cm
Výška sedáku od podlahy	51 cm
Nosnost	130 kg

Záruka

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Výrobce: HERDEGEN Paris – Francie

Distributor: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín

tel. 558 712 577, info@distrimed.cz

Datum vytvoření návodu: 1.4.2016

Poslední revize návodu: 14.8.2020



NÁVOD K POUŽITÍ

Toaletní křeslo NEW CLUB

AST 320 023 – modré

AST 320 011 – šedé

Použití

Toaletní křeslo je kompenzační pomůckou, které uživateli usnadňuje provádět fyziologické činnosti.

Popis

Křeslo je vyrobeno z pevného kovu natřeného epoxidovým povlakem a nepromokavého čalounění. Vybaveno vyjmutelnou plastovou toaletní nádobou s víkem. Sedadlo lze odstranit – usnadňuje to čištění a dezinfekci křesla. Otvor sedadla lze zakrýt víkem.

Používání

Umístěte nádobu na vyhrazené úchyty pod sedadlem. Lze to udělat seshora, po zvednutí sedátka dozadu, poté otočit na dvou plastových úchytech připevněných ke kovové konstrukci křesla.

Buďte opatrní při vyndávání nádoby, aby se zabránilo kontaktu s genitáliemi.

Nepřekračujte maximální nosnost křesla!

Údržba

Toaletní křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a chlór a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po vyčištění vysušit. Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte nádobu. Používejte čistící prostředky na toalety podle doporučení výrobce.

Technické informace

Hmotnost	6.8 kg
Celková šířka	61 cm
Celková výška	86 cm
Celková hloubka	49 cm
Vnitřní šířka	46 cm
Rozměry sedáku	44 x 40 cm
Výška zádové opěrky	46 cm
Výška sedáku od podlahy	51 cm
Nosnost	130 kg

Záruka

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Výrobce: HERDEGEN Paris – Francie

Distributor: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín

tel. 558 712 577, info@distrimed.cz

Datum vytvoření návodu: 1.4.2016

Poslední revize návodu: 14.8.2020