

# NÁVOD K POUŽITÍ



## TOALETNÍ KŘESLO POJÍZDNÉ FS 692



## POUŽITÍ

Toaletní křeslo je určeno pro osoby s omezenou pohyblivostí, s onemocněním pohybového aparátu apod. Bylo navrženo tak, aby bylo možné s ním nacouvat na běžnou toaletu.

## ÚVOD

Před použitím se ujistěte, že výrobek nevykazuje žádné poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy (viditelné a hmatatelné poškození, např. praskliny). Pokud tomu tak je, kontaktujte prosím prodejní místo. Poškozený výrobek nepoužívejte! Upozorňujeme, že při používání poškozeného výrobku může dojít k úrazu!

Důležité je, abyste si přečetli tuto příručku, která obsahuje důležité informace.

Máte-li dotazy ohledně používání výrobku, kontaktujte nás.

Rádi bychom také zdůraznili, že pokud si nejste jistí o vhodnosti používání této pomůcky vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

## POPIS


Rám křesla je vyroben z odolné lakované oceli. Pro pohodlné použití a čištění je vybaveno měkkým nepromokavým sedátkem. Je doplněno čtyřmi koly v otočných vidlicích s brzdami, odklopnými područkami a sanitární nádobou.

## SOUČÁSTI

- Rám
- Sedátko
- Zádová opěrka
- Pravá podnožka se stupačkou
- Levá podnožka se stupačkou
- Sanitární nádoba s víkem

## MONTÁŽ

- a. západka anebo pojistný šroub rámu (dle provedení)
- b. sedátko
- c. područka
- d. západka – pojistka odklopení područek
- e. podnožka se stupačkou
- f. boltec pro nasazení podnožky
- g. nášlapná brzda
- h. sanitární nádoba

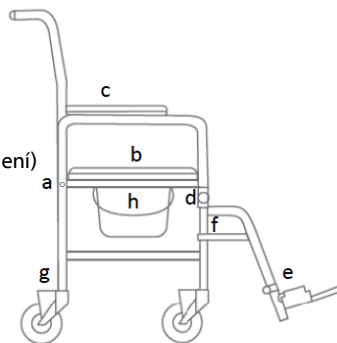

1. Vytáhněte západky, anebo povolte pojistné šrouby na zadní straně rámu (a)
2. Vsuňte trubky zádové opěrky do hlavního rámu, následně zasuňte západky, anebo utáhněte rukou pojistné šrouby na obou stranách.
3. Područky zasuňte do přední části rámu a zajistěte západkou (d).
4. Podnožky je třeba upevnit v přední části hlavního rámu. Nejdříve zjistěte, která podnožka je pravá a která levá. Následně podnožky umístěte na dva boltce (f) na hlavním rámu, a obraťte směrem dovnitř, dokud uzáver nezapadne.
5. Sanitární nádobu bez víka zasuňte ze zadní strany křesla do kolejniček pod sedátkem.

## POUŽÍVÁNÍ

- Křeslo je určeno výhradně ke zdolávání krátkých vzdáleností v místnostech. Vozík nemá pérování, a proto se nedoporučuje pro dlouhodobý transport pacienta.
- Není dovoleno používat loketní opěrky jako oporu při vstávání. Pokud je potřeba, vyžádejte pomoc druhé osoby.
- Brzdy jsou namontované na kolech. Kola zabrzdíte sešlápnutím brzdy směrem dolů – odbrzdění směrem nahoru.
- Při sedání a sesedání z křesla by měly být stupačky odklopené ve svislé poloze. **Není dovoleno používat stupačky jako oporu při vstávání a sesedání. Hrozí překlopení**

**křesla, anebo zlomení stupačky, což může mít za následek úraz. Na stupačky nestoupejte. Slouží jenom k volnému položení nohou.**

- Stupačky sklopte do vodorovné polohy pouze v případě, že uživatel již sedí na křesle.
- Při sedání a sesedání z křesla je nutno vždy bezpodmínečně zablokovat brzdy.
- Na křesle je potřeba sedět co nejvíce vzadu u záďové opěrky, aby nedošlo k nestabilitě křesla.
- Před použitím křesla jako toalety, sundejte sedák a ujistěte se, že nádoba je umístěna pod sedákem.
- Po sundání sedátka a vyjmutí nádoby je možno použít křeslo k nacouvání nad běžnou toaletní mísu.
- Během transportu se doporučuje používat polstrovaný sedák.
- Toaletní nádobu vyprázdněte a důkladně vymyjte po každém použití.

#### PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- **Nepřekračujte** maximální zatížení křesla!
- Křeslo je určeno pro použití uvnitř budov **POUZE** na rovném povrch. **Není** dovoleno používat křeslo na mokrému, kluzkém anebo silně znečištěném povrchu.
- **Křeslo není určeno k překonávání architektonických překážek (schody, prahy, nájezdy).**
- **Vždy se ujistěte**, že místo pro průjezd např. zárubněmi poskytuje dostatečnou šířku větší než je šířka křesla.
- **Není dovoleno** používat křeslo k transportu těžkých předmětů.
- **Není dovoleno** stoupat na sedák ani jinou část křesla.
- **Není dovoleno** připevňovat anebo zavěšovat předměty na rámu nebo loketní opěrky vozíku, protože se vozík může převrátit.
- **Není dovoleno** přenášet vozík s uživatelem.
- Při sedání a sesedání z křesla je **nutno vždy** bezpodmínečně zablokovat brzdy.
- **Nikdy nenechávejte** uživatele na křesle v bezprostřední blízkosti sjezdů, nájezdových ramp, mezipater, a to ani při zablokovaných brzdách.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Celková šířka: 55 cm

Vnitřní šířka: 45 cm

Celková hloubka: 87 cm

Výška sedáku od podlahy: 53 cm

Celková výška: 95 cm

Rozměry sedáku: 44 x 44 cm

Hmotnost: 10,6 kg

Nosnost: 100 kg

#### VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- **Pozor!** Je nutné systematicky kontrolovat stav vozíku a okamžitě informovat prodejce o všech poškozeních, které vyvolávají pochybnosti o bezpečnosti používání zařízení.
- **Pozor!** Skladujte vozík v suchých místnostech pod 40 ° C a nevystavujte přímému slunečnímu záření, vodě, prachu, písku apod. Vozík musí být při skladování dostatečně chráněn (zakrytý) proti vnějším vlivům. Je třeba si uvědomit, že povrchová teplota čalounění a rámu může vzrůst po vystavení slunečnímu záření, anebo jinému zdroji tepla, což může způsobit opaření.
- **Pozor!** Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce. V případě potřeby se obraťte na prodejce.
- **Pozor!** Neprovádějte sami žádné opravy nebo konstrukční úpravy.
- **Pozor!** Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody či úrazy způsobené použitím výrobků v rozporu s touto instrukcí a účelem použití, a nedodržením bezpečnostních doporučení.

## ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

### Prohlídky

Je nutné systematicky provádět nezávislou kontrolu technického stavu křesla:

- Před každým použitím: Zkontrolujte stav mechanických součástí, správnou montáž demontovatelných prvků, správnou funkci brzd a správné rozložení křesla.
- Jedou za 4 týdny: Zkontrolujte stav mechanických součástí, včetně správného mazání, správného nastavení brzd a stavu sedadla. K promazání pohyblivých částí je možno použít univerzální mazivo, např. sprej WD-40.
- Průběžně: Provádějte vizuální kontrolu ohledně stability a vzhledu rámu (praskliny apod.). V případě zjištění nutnosti opravy anebo seřízení, kontaktujte prodejce anebo dovozce.

### Čištění

Čalounění a sedák lze čistit vlažnou vodou navlhčeným (ne mokrým) hadříkem bez použití čisticích prostředků. Silnější zašpinění je třeba vyčistit pomocí houbičky. Při čištění čalounění je třeba dbát na to, aby nebylo příliš namočeno. Sušit mimo zdroje tepla.

Rám je potřeba pravidelně čistit navlhčeným hadrem a následně důkladně osušit. Možno použít běžné čistí a konzervační prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.


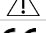
Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte nádobu a desku sedadla. Používejte čisticí prostředky na toalety podle doporučení výrobce.

Pokud křeslo používá více osob (např. v domově pro seniory), je nutno používat dezinfekci. K dezinfekci je potřeba použít dezinfekční prostředky vhodné pro materiály, ze kterých je křeslo vyrobeno. Doporučujeme použít bezalkoholový přípravek určený pro zdravotnictví k ošetření předmětů z citlivých materiálů.

### ZÁRUKA A SERVIS

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

### Symbols

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo série		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Přečtěte si návod
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		



Datum poslední revize návodu: 5.8.2021

 Výrobce: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko  
Výhradní distributor: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín,  
tel.: 558 711 827, [info@distrimed.cz](mailto:info@distrimed.cz), [www.distrimed.cz](http://www.distrimed.cz)