

**Úplná technická specifikace:**

PARAMETR:	AR-005	AR-006	AR-007	AR-022
Rám (materiál):	ocelový	hliníkový	hliníkový	hliníkový
Barva rámu:	modrá	modrá,stříbrná	stříbrná	bordó
Typ rámu:	skládací	skládací	skládací	skládací
Celková šířka:	61cm	65 cm	62 cm	60 cm
Výška sedáku od podlahy:	61 cm	52 - 60 cm	56 cm	54cm
Výškové nastavení rukojetí:	75 - 98cm	94 - 101cm	81 - 94cm	79 - 91cm
Výbava	košík, tác	síťovka	taška	košík
Hmotnost produktu:	11,9 kg	6 kg	7 kg	8,2 kg
Maximální zatížení:	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg

**ZÁRUKA A SERVIS**

- 1) Záruku na tento produkt, zakoupený na území České republiky, zajišťuje firma Distrimed s.r.o. - distributor výrobků značky ARMEDICAL S.C. v ČR.
- 2) Pokud zjistíte, že produkt nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce, kde byl nákup proveden, nebo firmu Distrimed s.r.o., tel.: 558 712 577, [reklamace@distrimed.cz](mailto:reklamace@distrimed.cz). Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Distrimed – sklad, reklamace, Trinec Kinská, čp. 601, PSC: 739 61
- 3) Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé mechanickým poškozením (oděry rámu, poškrábání plastových dílů), poškození vlivem opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, tj. například otěru pryžových násadců, koleček, plastových opěrek rukou apod.
- 4) Záruka zaniká v případě, kdy je produkt používán v rozporu s jeho určením a pokyny v návodu k použití, a také v případě, že uživatel překročí maximální přípustné zatížení stanovené výrobcem.
- 5) Záruka zaniká při jakémkoliv konstrukční úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem.
- 6) Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a skladování a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí, a také při překročení uživatelem maximální nosnosti stanovené výrobcem.

Distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, [info@distrimed.cz](mailto:info@distrimed.cz), [www.distrimed.cz](http://www.distrimed.cz)

**ARmedical®**  
HomeCare Line

## NÁVOD K POUŽITÍ

### CHODÍTKA ČTYŘKOLOVÁ

AR-005  
Chodítka čtyřkolová, ocelové  
CLASSIC  
Basic UDI-DI:590771338P4S1G4



AR-006  
Chodítka čtyřkolová, hliníkové  
PRESTIGE  
Basic UDI-DI: 590771338P4A1EE



AR-007  
Chodítka čtyřkolová, hliníkové  
DYNAMIC  
Basic UDI-DI: 590771338P4A1EE



AR-022  
Chodítka čtyřkolová, hliníkové  
COMFORT  
UDI-DI: 590771338P4A1EE



**ARMEDICAL S.C.**  
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska  
tel./fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111  
[www.armedical.pl](http://www.armedical.pl), e-mail: [biuro@armedical.pl](mailto:biuro@armedical.pl)





## NÁVOD K POUŽITÍ – CHODÍTKA ČTYŘKOLOVÁ

### Vážený zákazníku,

*děkujeme za nákup našeho produktu, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste do nás vložili. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom zajistili, že náš výrobek splní Vaše očekávání. Věříme, že bude významnou pomocí, díky kterým vám bude mnohem jednodušší pohybovat se doma i při každodenních procházkách. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití, je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy. Uchovejte prosím tuto příručku.*

### Účel použití:

Rehabilitační chodítko je pomocné a rehabilitační zařízení určené pro osoby se zdravotním postižením s pohybovými poruchami, problémy se vstáváním nebo problémy s udržováním rovnováhy při chůzi. Používá se také k udržení rovnováhy při učení se chodit po nemoci nebo zranění.

### Technická specifikace:

Maximální hmotnost uživatele zajišťující bezpečné používání chodítka – **136 kg**

Maximální přípustné zatížení košíku/tašky na nákupy – **5 kg**



### Varování a doporučení:

Abyste se vyhnuli nehodě, prosíme o:

- 1) Kontrolu, zda jsou všechny prvky rámu (7) rovné, bez poškození (např. během přepravy).
- 2) Kontrolu, zda jsou obě držadla/rukojeti (1) ve stejné výšce.
- 3) Kontrolu, zda jsou obě držadla/rukojeti (1) pevně připojené k rámu tak, aby se zabránilo jejich vyjmutí.
- 4) Kontrolu, zda chodítko obsahuje všechna čtyři kola (5) a (8).
- 5) Kontrolu, zda jsou kola bezpečně přišroubována (5) a (8).
- 6) Kontrolu, zda jsou všechny prvky nosného rámu pevně spojeny (7).
- 7) Kontrolu, zda je chodítko zcela rozloženo.
- 8) Nerozkládejte chodítko na místech, kde může být kluzká podlaha (rozlitá kapalina, led).

**9) Nepoužívejte chodítko jako invalidní vozík - platí pro model AR-022**



### Abyste předešli zranění:

- 1) Chodítko musí být zcela rozloženo (po rozložení musí vypadat přesně jako na obrázku).
- 2) Před každým použitím je nutné zkontrolovat stabilitu chodítka.
- 3) Rukojeti (držadla) (1) musí být nastavena ve stejné výšce.
- 4) Chodítko používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu. Nepoužívejte na schodech!
- 5) Buďte zvláště opatrní na mokřích, kluzkých površích.
- 6) Při pohybu buďte obzvláště opatrní na ležící koberečky, oděvy, hračky atd., a také ležící zvířata, nerovné, povrchy s prasklinami, nerovné chodníky, obrubníky atd.
- 7) Chodítko **musí** být vždy drženo oběma rukama! Ruce pevně svírají držadla (1), s možností rychlého zatáhnutí za rukojeti brzdy (2).
- 8) Chodítko nesmí být vystaveno dlouhodobým extrémním povětrnostním podmínkám (např. velmi silný mráz nebo přímé silné sluneční záření).
- 9) Chodítko nepřetěžujte, nepřekračujte maximální zatížení povolené výrobcem.
- 10) Nesmí být překročeno maximální přípustné zatížení košíku/tašky (3)
- 11) Před použitím se poraďte s lékařem.

**12) Model AR-022 – NIKDY NESTOUEPTE NA PODNOŽKU (9). NEBEZPEČÍ NEHODY!**

### Pokyny k údržbě:

Pravidelně čistěte hadříkem navlhčeným vodou s jemným čistícím prostředkem. Poté důkladně utřete/vysušte měkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky!  
Gumová kola (5) (8) jsou součástí podléhající opotřebení a v případě nadměrného opotřebení je nutné je vyměnit za nově.

### Odstraňování problémů:

Pokud narazíte na problémy, přečtěte si prosím tuto kapitolu. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejní místo nebo servis. Opravovat chodítko svépomocí **JE ZAKÁZÁNO!!!** Může to způsobit nehodu.

### Chodítko je nestabilní.

- a) Jsou obě držadla/rukojeti (1) ve stejné výšce? Pokud ne, nastavte je správně.
- b) Jsou obě držadla/rukojeti (1) pevně spojené s rámem? Pokud ne, zablokujte je / zajistěte šroubem.
- c) Je chodítko plně rozloženo? Pokud ne, rozložte jej a zkontrolujte jeho stabilitu.
- d) Jsou všechna kola (5) a (8) pevně dotažena? Pokud ne, dobře je utáhněte.
- e) Jsou všechny prvky rámu (7) vzájemně pevně spojeny? Pokud ne, kontaktujte místo nákupu. **CHODÍTKO NEPOUŽÍVEJTE!!!**

### KOMPONENTY / POUŽITÍ



**POZOR!!! NIKDY NESTOUEPTE NA PODNOŽKU (9) HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU!**

- |                                     |                               |             |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1. Držadla / rukojeti               | 5. Kola s brzdou              | 9. Podnožka |
| 2. Rukojeť brzdy s parkovací funkcí | 6. Blokovací západky / šrouby | 10. Opěrka  |
| 3. Košík / taška na nákupy          | 7. Rám                        |             |
| 4. Sedák                            | 8. Kola v otočných vidlicích  |             |

### Příprava k použití

- 1) Vyjměte chodítko z kartonu nebo z fóliového obalu.
- 2) Nejprve zkontrolujte technický stav produktu v souladu s odstavcem **Varování a doporučení**.
- 3) Držadla/rukojeti (1) vložte do otvorů v rámu (6) jak je zobrazeno na obrázku výše.
- 4) Držadla/rukojeti (1) zatlačte/přišroubujte k rámu (6) aby je nebylo možno vyjmout.
- 5) Upravte výšku držadel/rukojetí (1) podle výšky uživatele. Za tímto účelem vyšroubujte/vyjměte svorku (AR-005) šroub (AR-006, AR-022), západku (AR-007) (6), která je v rámu (7). Nastavte požadovanou výšku zasunutím nebo vysunutím držadel. Vložte zpět šroub/západku do otvoru v rámu, dotáhněte/zajistěte. Opakujte pro obě rukojeti. **UPOZORNĚNÍ!** Rukojeti (1) musí být nastaveny na stejnou výšku.
- 6) Po rozložení je bezpodmínečně nutné zkontrolovat správnou funkci brzd. Položte ruce na držadla (1), prsty zatáhněte rukojeti brzd (2) směrem nahoru (směrem k držadlu) a zkontrolujte, zda přítlačné bloky blokují brzděná kola (5). Pro kontrolu brzdění v parkovací poloze zatáhněte větší silou rukojeti brzdy (2) směrem dolů (směrem od držadla), až zaklapne západka. Brzda by měla být v parkovací poloze - poté lehkým zatlačením chodítka dopředu zkontrolujte, zda jsou kola zablokovaná.
- 7) Nasaďte košík, táč (AR-005, AR-022), tašku (AR-007) (3). Viz. obrázek výše.

**Ohledně vhodnosti používání chodítka s ohledem na zdravotní stav uživatele, se případně poraďte se svým lékařem anebo fyzioterapeutem.**

### Ukončení používání:

Chodítko složíte zatáhnutím zadních a předních kol/noh směrem k sobě (AR-005, AR-006, AR-022). V modelech AR-006, AR-022 se nachází úchyt ke složení pod sedátkem. Chodítko AR-007 složíte zatáhnutím za úchyt na sedáku směrem nahoru a následným stažením levé a pravé části chodítka směrem k sobě.

### Čištění a skladování:

1. Uchovejte chodítko na místo, kde nebude vystaveno mechanickému poškození.
2. V případě znečištění postupujte podle odstavce „Pokyny k údržbě“ této příručky.

**DĚKUJEME ZA VÝBĚR A ZAKOUPENÍ NAŠEHO PRODUKTU**

