



# DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÝCH NÁSTROJŮ

## Micro 10+

### DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÝCH NÁSTROJŮ

- Vhodný pro širokou škálu nástrojů
- Nekorozivní s rozsáhlou materiálovou kompatibilitou
- Vhodný pro ultrazvukové lázně pro posílení čisticího účinku
- Bez parfemace



# Micro 10+

Dezinfekce a čištění stomatologických a chirurgických nástrojů

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Čirý, žlutý roztok
- Relativní hustota při 20°C: 1,027
- pH koncentrovaného roztoku při 20°C: 10,6
- pH zředěného roztoku ve 2%: 10,6


## NÁVOD K POUŽITÍ

**Před použitím:** Navlečte si ochranné rukavice. **Pro 5 l kanystř:** Před prvním použitím pumpu natlakujte.



Dodržujte dobu expozice pro vybranou koncentraci. Může být používáno v ultrazvukových čističkách.

Roztok vyměňte, jakmile je viditelně znečištěný, nejméně však jednou denně, aby byla zachována účinnost přípravku.

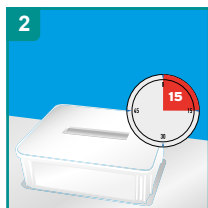

Zdravotnický prostředek zcela ponořte. Dezinfekční lázeň musí být během doby kontaktu přikrytá.



Viditelné nečistoty očistíte kartáčkem.



Pro odstranění veškerých stop přípravku a organických nečistot důkladně opláchněte ošetřené zdravotnické prostředky pitnou vodou.

## MIKROBICIDNÍ VLASTNOSTI

ÚČINNOST/PODMÍNKY	KONCENTRACE	DOBA EXPOZICE
Baktericidní* EN 13727/EN 14561	2%	15 min
Účinnost proti kvasinkám* EN 13624/EN 14562	2%	15 min
Účinný proti obaleným virům* EN 14476/EN 17111	1%	15 min
Dezinfekce nástrojů dle VAH	3%	15 min
(baktericidní*, účinnost proti kvasinkám*)	2%	60 min

\*=nečisté podmínky.

## BALENÍ A INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
Micro 10+	10 x 1 l	3113450
Micro 10+	4 x 2,5 l	3122610
Micro 10+	2 x 5 l (s dvěma 20 ml pumpami)	3113470

### Prvky označení

#### Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly :  
nebezpečnosti

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti : H290 Může být korozivní pro kovy.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

#### Pokyny pro bezpečné zacházení :

**Převence:**  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.

#### Opatření:

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.  
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

**Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:** benzalkonium chlorid  
Tetrasodná sůl kyseliny etyldiamintetraoctové



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

## OBLAST POUŽITÍ

Čištění a dezinfekce zdravotnických prostředků v dentální oblasti.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím pumpu natlakujte.

1. Dodržujte dobu expozice pro vybranou koncentraci. Může být používáno v ultrazvukových čističkách.
2. Zdravotnický prostředek zcela ponořte. Dezinfekční lázeň musí být během doby kontaktu přikrytá.
3. Viditelné nečistoty očistíte kartáčkem.
4. Pro odstranění veškerých stop přípravku a organických nečistot důkladně opláchněte ošetřené zdravotnické prostředky pitnou vodou.

Roztok vyměňte, jakmile je viditelně znečištěný, nejméně však jednou denně, aby byla zachována účinnost přípravku.

## SLOŽENÍ

Aalkylbenzylidimethylammonium chloridu, amfoterní neionogenní tenzidy, komplexotvorné činidlo, inhibitor koroze a přídavná látka.

## SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí. Respektujte informace pro používání (vytvořené v souladu s evropskými pravidly pro klasifikaci a označování chemických směsí). Skladování: +5°C až +25°C.

## CERTIFIKÁTY

Zdravotnický prostředek. Plná antimikrobiální účinnost přípravku Micro 10+ je zahrnuta ve vědecké dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.

## POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Přečtěte si etiketu a informace o výrobku.



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

**ECOLAB GESELLSCHAFT MBH**  
Odštěpný závod  
Vocetářova 2449/5  
Praha 8, 180 00  
Česká republika

Distributor pro ČR:  
**ECOLAB GESELLSCHAFT MBH**  
Rivergate D1/4OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Austria



www.anios.com