

Incidin™ Pro



Koncentrovaný roztok s rychlým účinkem při úklidu a dezinfekci.

Koncentrovaný kapalný prostředek na úklid a dezinfekci.

Prostředek Incidin™ Pro stanovuje díky svému chytrému a vyváženému složení nová měřítka pro čištění a dezinfekci povrchů.

- váš PROfesionál v účinnosti
- váš PROfesionál v rychlosti
- váš PROfesionál v kompatibilitě

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Prostředek Incidin Pro účinně působí proti bakteriím, kvasinkám a různým virům (včetně noroviru). Je vhodný pro použití v rizikových oblastech a na mnoha různých površích, od běžných pracovišť a veřejných prostor až po operační sály a jednotky intenzivní péče.

VYNIKAJÍCÍ ÚČINNOST A MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

Produkt prošel důkladnými zkouškami na všech typech povrchů typických pro zdravotnická zařízení – od kovů, linolea a PVC až po keramiku, pogumované a plastové povrchy – a dosáhl vynikajících výsledků.

SLOŽENÍ BEZ ALDEHYDŮ, PARFEMACE A BARVIV

Produkt se snadno používá díky absenci těkavých látek, barviv a parfemace.



Indicin™ Pro

Koncentrovaný kapalný prostředek na úklid a dezinfekci.



Indicin™ Pro
Lahev 2 l



Indicin™ Pro
Kanystr 6 l

Vlastnosti produktu

- bezbarvý až nažloutlý
- pH koncentrovaného produktu při 20 °C: cca 11,0
- pH produktu ředěného pitnou vodou (0,5 %): cca 9,5
- pH produktu ředěného pitnou vodou (2,0 %): cca 10,0
- Hustota při 20 °C: 1,01 g/ml
- Refrakční index: 1,385

Mikrobiologické vlastnosti

Tvrzení/podmínky	Koncentrace (%) / (ml/l)	Doba kontaktu
Baktericidní účinky podle EN 13727 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5 %, 5 min a 0,5 %, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Protivirální účinky podle EN 13624 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Tuberkulocidní a mykobaktericidní účinky podle EN 14348	1,5% / 15	60 min*
Virucidní účinky s omezeným spektrem podle EN 14476 (Adenovirus - Norovirus)	2,0% / 20 1,0% / 10	30 min* 60 min*
Účinnost proti noroviru podle EN 14476	1,5% / 15	30 min*
Účinnost proti obaleným virům podle EN 14476	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 30 min*

* znečištěné prostředí, ** čisté prostředí

Informace o balení a objednání

Produkt	Balení	Objednací kód
Indicin™ Pro	Lahev 3 x 2 l	3148488
Indicin™ Pro	Kanystr 6 l	3146508



Indikace

Zdravotnický prostředek: Koncentrovaný kapalný prostředek na čištění a dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků.

Biocid: Pro obecné povrchy.

Návod k použití

6 l: Zřed'te koncentrát s vodou (max. 60 °C) pro dosažení požadované koncentrace.

Pro zředění např. do koncentrace 0,5 % (5 ml/l) přidejte 40 ml do 8 litrů vody.

Aplikujte dostatečné množství (+/- 30 ml/m²) s mechanickým působením (např. vytírání, mopování).

Dodržujte doporučenou dobu kontaktu pro požadovaný antimikrobiální účinek.

2 l: Zřed'te koncentrát s vodou (max. 60 °C) pro dosažení požadované koncentrace.

Pro zředění např. do koncentrace 0,25 % (2,5 ml/l) v 8 litrech jednou obraťte lahev a přidejte jednu 20ml dávku, na koncentraci 0,5 % (5 ml/l) v 8 litrech dvakrát obraťte lahev a přidejte dvě 20ml dávky (celkem 40 ml). Aplikujte dostatečné množství (+/- 30 ml/m²) s mechanickým působením (např. vytírání, mopování). Dodržujte doporučenou dobu kontaktu pro požadovaný antimikrobiální účinek.

Složení

100 g obsahuje: 10,0 g 2-fenoxyetanol (CAS N° 122-99-6), 8,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (Diamine) (CAS N° 2372-82-9) a 7,5 g (C12-16) benzalkoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS N° 68424-85-1).

Skladování

Při teplotách 0 °C až +25 °C.

Chraňte před slunečním zářením.

Zamezte průniku vlhkosti k obsahu.

Zdravotnický prostředek a biocidní produkt – bezpečné použití

Přečtete si etiketu a informace o produktu.



BIOCIDNÍ PRODUKT PRO DEZINFEKCI POVRCHU (SKUPINA 1 – PT2).

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Distributor:

**ECOLAB GMBH,
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD**

Vocetářova 2449/5

180 00 Praha 8

Česká republika

www.ecolab.com



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1

40789 Monheim am Rhein

Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™