

RYCHLÁ MULTI-DROGOVÁ TESTOVACÍ KAZETA – TEST ZE VZORKU VLASŮ

Před vykonáním testu nechce všechny součásti testu dosáhnout pokojové teploty.

PROVEDENÍ TESTU

KROK 1: Odeberte vzorek vlasů (co nejblíže pokožce, nejdále však 3cm od ní) a na odběrovou kartu ho na malé kousky nastříhejte.


KROK 2: Do odběrové zkumavky s práškem přidejte celý pufr 1, protřepejte.

KROK 3: Přidejte na malé kousky nastříhaný vzorek vlasů, našroubujte víčko, protřepejte a nechte 5 minut stát.

Do kapátka naberte 80 µL pufru 2 (tzn. k plnicí čáře), přeneste obsah do odběrové zkumavky, našroubujte víčko, protřepejte.

KROK 4: Položte testovací kazetu na čistou a rovnou plochu, otevřete horní víčko odběrové zkumavky a přeneste 2 plné kapky vzorku do každého vzorkového otvoru (S).

Výsledky odečítejte po 5-10 minutách.

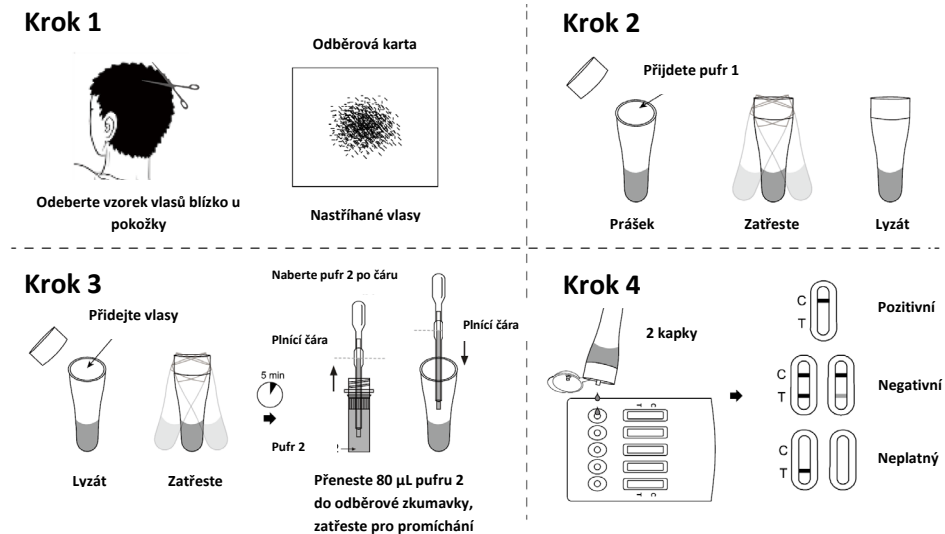

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK: Objeví se dvě barevné čáry

POZITIVNÍ VÝSLEDEK: Barevná čára se objeví pouze v oblasti kontrolní čáry (C). V oblasti testovací čáry (T) se barevná čára neobjeví.

Upozornění – jakýkoli barevný odstín v oblasti testovací čáry (T) značí negativní výsledek

NEPLATNÝ VÝSLEDEK: Neobjeví se barevná čára v oblasti kontrolní čáry (C)