

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ HLINÍKOVÉ

TGRR A882

Účel

Chodítko je určeno pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

Popis produktu

- výška sedáku od podlahy: 53 cm
- šířka sedáku: 45 cm
- průměr koleček: 20 cm
- nastavitelná výška 76,7-87,5cm
- Max. zatížení 110 kg
- Hmotnost 8,5 kg



Skládací odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými rukojetmi. Chodítko je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace, odnímatelnou opěrkou zad, polstrovaným sedátkem a košíkem.



Použití

Rám chodítka vyjměte z krabice a stlačením přední a zadní části od sebe rám rozložte. Pro úplné rozložení zatáhněte za popruh na spodní spojovací tyči směrem dolů tak, aby se vzpěra spojující přední a zadní část narovнала do vodorovné polohy. Sklopte sedátko. Přiložená madla vložte do otvorů, nastavte požadovanou výšku madel a zvolenou pozici upevněte pomocí šroubu a matice s umělohmotnou krytkou. Šrouby pečlivě dotáhněte. Bowdenová lanka by měla vézt zevně rámu i madel. Opěrku zad zasuněte do otvorů zmáčknutím aretačních pojistek. Zavěste košík na přední část anebo pod sedátko.

Při skládání chodítka sundejte košík, nadzdvihněte sedátko a zatáhněte za popruh na spodní spojovací tyči směrem nahoru a rám složte přední a zadní části k sobě.

Brzdy:

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy (A) směrem nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačením páky brzdy směrem dolů, by se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Vždy používejte obě brzdy najednou!!!

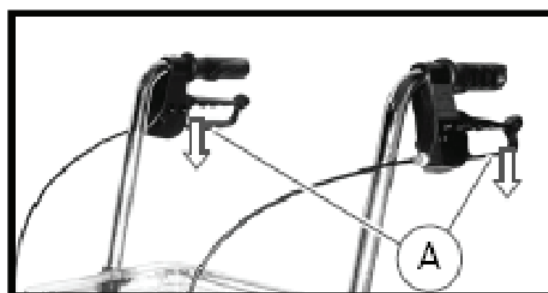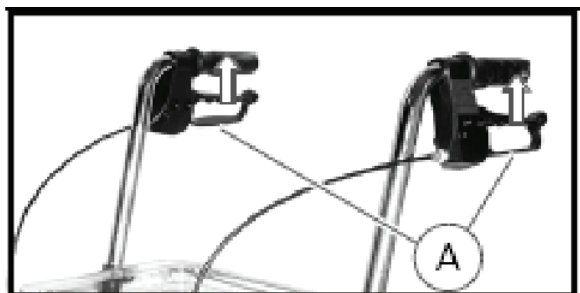

Brzdy jsou seřizené ve výrobě. Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrždění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídíte brzdy pomocí šroubů bowdenového lanka.

Vrchní regulace brzdy



Spodní regulace brzdy



Vrchní regulace brzdy – povolte připojení lanka, zatáhněte lanko na požadovanou vzdálenost a zatáhněte kontramatku. Po správném seřízení by měl být rozdíl v poloze páčky brzdy v zabržděné pozici a maximální dolní polohou páčky (v zablokované pozici brzdy) asi 1,5 cm

Spodní regulace brzdy – povolte klíčem matku. Držte brzdou a zároveň zatáhněte za černé lanko brzdy tak, aby jste zajistili napnutí lanka. Dotáhněte matici a zkontrolujte účinek brzd.

Čištění a údržba

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými neabrazivními čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Chodítka vždy pečlivě osušte. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bowdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

Záruka

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím (pokud není popsána tato činnost v návodu, např. seřízení brzd apod)