

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁSTAVEC NA WC
bez poklopu / s poklopem
MOB004/MOB005

POUŽITÍ

Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní výšky mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Nástavec je vyroben z pevného, lehce omyvatelného plastu bílé barvy. Dle typu je vybaven poklopem anebo je bez poklopu. Použitím tohoto nástavce se dosáhne zvýšení standardní mísy o 10 cm.

Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, je nástavec vybaven dvěma vymešovacími patkami se šrouby v zadní části a jednou vymešovací patkou v přední části.

Povolte matice (šrouby) tak, aby šlo nástavec nasadit na mísu. V přední části se musí vymešovací patka opřít o přední část mísy. Dotáhněte oba šrouby ve směru hodinových ručiček tak, aby se nástavec nepohyboval po míse. Nedotahujte šrouby velkou silou, stačí tak, aby se nástavec nepohyboval na míse.

Max. zatížení 120 kg

ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Lze sterilizovat – 1 minuta-85°C

VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích patek ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s vhodným madlem.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno: Mobilex Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁSTAVEC NA WC
bez poklopu / s poklopem
MOB004/MOB005

POUŽITÍ

Nástavec na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní výšky mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Nástavec je vyroben z pevného, lehce omyvatelného plastu bílé barvy. Dle typu je vybaven poklopem anebo je bez poklopu. Použitím tohoto nástavce se dosáhne zvýšení standardní mísy o 10 cm.

Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, je nástavec vybaven dvěma vymezovacími patkami se šrouby v zadní části a jednou vymezovací patkou v přední části.

Povolte matice (šrouby) tak, aby šlo nástavec nasadit na mísu. V přední části se musí vymezovací patka opřít o přední část mísy. Dotáhněte oba šrouby ve směru hodinových ručiček tak, aby se nástavec nepohyboval po míse. Nedotahujte šrouby velkou silou, stačí tak, aby se nástavec nepohyboval na míse.

Max. zatížení 120 kg

ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Lze sterilizovat – 1 minuta-85°C

VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích patek ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s vhodným madlem.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno: Mobilex Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827

