

# NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTAVEC NA WC S MADLY

MOB020


## POUŽITÍ

Nástavec na WC s madly je kompenzační pomůckou pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Používá se v případech, kdy pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšení standardní výšky mísy a současně možnost opory, kterou poskytují madla, usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

## POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Nástavec je vyroben z pevného, lehce omyvatelného plastu bílé barvy a je vybaven poklopem a sklopnými polstrovanými madly. Použitím tohoto nástavce se dosáhne zvýšení standardní mísy o 9, 13 nebo 17 cm.

- Odstraňte dvě plastové zásepky **A** v přední části
- Uvolněte šroub a umístěte podpurnou hrazdu **B** v požadované výšce
- Stejným způsobem umístěte druhou zadní hrazdu. Obě hrazdy musí být ve stejné výšce
- Odstraňte původní záchodové prkénko a do místa, kde bylo našroubované, vsuňte dvě tyče se závity **C**
- Dotáhněte plastové matky. Tímto upevníte nástavec na míse
- Zkontrolujte, že nástavec pevně sedí na míse
- Nasaďte madla– zamáčkněte pojistky **1** a vložte do otvorů **2**

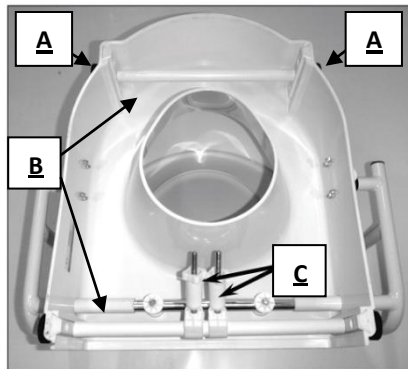

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková výška při použití se standardní mísou: 83-95 cm

Šířka x délka: 43 cm x 49,5 cm

Nastavitelná výška nástavce: 9, 13 anebo 17 cm

Šířka mezi horními částmi madel: 49 cm

Hmotnost: 6,2 kg

Max. zatížení : 120 kg



## ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržívat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Lze sterilizovat – 1 minuta- 85°C

## VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků !

## ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno: Mobilex Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827



# NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTAVEC NA WC S MADLY

MOB020


## POUŽITÍ

Nástavec na WC s madly je kompenzační pomůckou pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Používá se v případech, kdy pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšení standardní výšky mísy a současně možnost opory, kterou poskytují madla, usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

## POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Nástavec je vyroben z pevného, lehce omyvatelného plastu bílé barvy a je vybaven poklopem a sklopnými polstrovanými madly. Použitím tohoto nástavce se dosáhne zvýšení standardní mísy o 9, 13 nebo 17 cm.

- Odstraňte dvě plastové zásepky **A** v přední části
- Uvolněte šroub a umístěte podpůrnou hrazdu **B** v požadované výšce
- Stejným způsobem umístěte druhou zadní hrazdu. Obě hrazdy musí být ve stejné výšce
- Odstraňte původní záchodové prkénko a do místa, kde bylo našroubované, vsuňte dvě tyče se závití **C**
- Dotáhněte plastové matky. Tímto upevníte nástavec na míse
- Zkontrolujte, že nástavec pevně sedí na míse
- Nasadte madla – zamáčkněte pojistky **1** a vložte do otvorů **2**

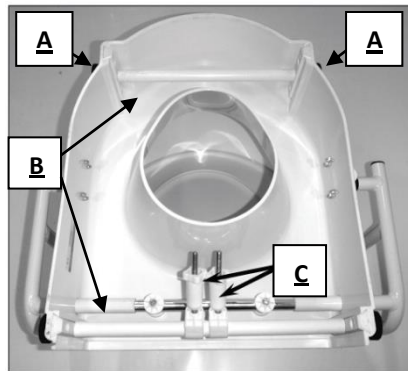

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková výška při použití se standardní mísou: 83-95 cm

Šířka x délka: 43 cm x 49,5 cm

Nastavitelná výška nástavce: 9, 13 nebo 17 cm

Šířka mezi horními částmi madel: 49 cm

Hmotnost: 6,2 kg

Max. zatížení : 120 kg



## ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Lze sterilizovat – 1 minuta-85°C

## VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků !

## ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno: Mobilex Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827

