

CHODÍTKO PRO CHŮZÍ A STÁNÍ

FS913L, 812LC

Popis produktu

- skládací chodítko
- dvoufunkční: pro chůzi a stání
- hliníkový rám
- anatomické rukojeti z kontaktně tepelného polyethylenu
- gumové krytky
- nastavitelná výška 77-95cm
- Max. zatížení 100 kg
- Hmotnost 2.4 kg



Chodítko usnadňující chůzi se skládá z hliníkové konstrukce, anatomických rukojetí a gumových krytek proti uklouznutí.

Chodítko FS913L má dvojí použití. Má funkci chůze - obě strany se pohybují nezávisle na sobě, což umožňuje pohybovat se bez nutnosti zvedání. Nicméně, při použití blokády je chodítko statické.

Blokaci provedete tak, že vyjmete platové objímky s kovovým kolíkem (viz.obrázek - pozice 2) umístěné na spodní horizontální příčce a zasunete je do otvorů z přední strany svislé konstrukce.

Účel

Chodítko je určeno pro osoby se zdravotním postižením pohybového ústrojí a pro osoby, které potřebují oporu při chůzi, a může být použito pro ty, kteří se učí chodit po nemoci nebo úrazu, slouží jako pomoc pro udržení rovnováhy a přenášení váhy těla při nemocech ortopedických a po úrazech.

Použití

Lehce rozložitelný a složitelný s jednoduchým mechanismem. Pro rozložení uchopte za madla a roztáhněte až se madla zablokují. Pro složení přesuňte plastové zabezpečení umístěné na vrchní horizontální příčce (viz.obrázek pozice 1), stiskněte kovové tlačítko a přitáhněte k sobě ramena chodítka.

Před použitím chodítka nastavte jeho výšku dle výšky uživatele. Stlačte kovový aretační kolík a vyberte vhodnou polohu vnitřní trubky. Po nastavení zablokujte trubky vůči sebe pomocí kovového aretačního kolíku. Výška chodítka může být upravena dle výšky uživatele (v rozsahu 77 až 95 cm).

Technika pohybu spočívá na střídavém zvedání a pohybem vpřed.

Čištění a údržba

Chodítko pravidelně čistěte vodou a saponátem. Gumové krytky podléhají opotřebení, a proto je pravidelně měňte za nové.

Záruka

24 měsíců od datumu nákupu. Záruka se nevztahuje na gumové krytky.

Vyrobeno: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827



CHODÍTKO PRO CHŮZÍ A STÁNÍ

FS913L, 812LC

Popis produktu

- skládací chodítko
- dvoufunkční: pro chůzi a stání
- hliníkový rám
- anatomické rukojeti z kontaktně tepelného polyethylenu
- gumové krytky
- nastavitelná výška 77-95cm
- Max. zatížení 100 kg
- Hmotnost 2.4 kg



Chodítko usnadňující chůzi se skládá z hliníkové konstrukce, anatomických rukojetí a gumových krytek proti uklouznutí.

Chodítko FS913L má dvojí použití. Má funkci chůze - obě strany se pohybují nezávisle na sobě, což umožňuje pohybovat se bez nutnosti zvedání. Nicméně, při použití blokády je chodítko statické.

Blokaci provedete tak, že vyjmete platové objímky s kovovým kolíkem (viz.obrázek - pozice 2) umístěné na spodní horizontální příčce a zasunete je do otvorů z přední strany svislé konstrukce.

Účel

Chodítko je určeno pro osoby se zdravotním postižením pohybového ústrojí a pro osoby, které potřebují oporu při chůzi, a může být použito pro ty, kteří se učí chodit po nemoci nebo úrazu, slouží jako pomoc pro udržení rovnováhy a přenášení váhy těla při nemocech ortopedických a po úrazech.

Použití

Lehce rozložitelný a složitelný s jednoduchým mechanismem. Pro rozložení uchopte za madla a roztáhněte až se madla zablokuji. Pro složení přesuňte plastové zabezpečení umístěné na vrchní horizontální příčce (viz.obrázek pozice 1), stiskněte kovové tlačítko a přitáhněte k sobě ramena chodítka.

Před použitím chodítka nastavte jeho výšku dle výšky uživatele. Stlačte kovový aretační kolík a vyberte vhodnou polohu vnitřní trubky. Po nastavení zablokujte trubky vůči sebe pomocí kovového aretačního kolíku. Výška chodítka může být upravena dle výšky uživatele (v rozsahu 77 až 95 cm).

Technika pohybu spočívá na střídavém zvedání a pohybem vpřed.

Čištění a údržba

Chodítko pravidelně čistěte vodou a saponátem. Gumové krytky podléhají opotřebení, a proto je pravidelně měňte za nové.

Záruka

24 měsíců od datumu nákupu. Záruka se nevztahuje na gumové krytky.

Vyrobeno: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827

