

NÁVOD K POUŽITÍ CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ SKLÁDACÍ JMC 3016WS

POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn dvěma výškově nastavitelnými nohama s protiskluzovými pryžovými nástavci a dvěma výškově nastavitelnými nohama s plnými kolečky. Chodítko je vybaveno pojistkou sklápění (A) a ergonomickými pěnovými rukojeťmi.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška: 81-99 cm
Celková šířka: 63,5 cm
Celková hloubka: 51 cm
Hloubka ve složeném stavu: 11 cm
Průměr koleček: 12 cm
Hmotnost: 3,0 kg
Nosnost: 136 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 136 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítko se čtyřmi výškově nastavitelnými nohama, z nichž přední dvě jsou vybaveny plnými kolečky.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ CHODÍTKA

Chodítko rozložte rozevřením boků chodítka směrem od sebe až do polohy, kdy zapadne bezpečnostní pojistka (A), chráněná plastovou krytkou, umístěná na horní vzpěře chodítka. Pro složení chodítka zmáčkněte bezpečnostní pojistku (A) a tlačte boky chodítka směrem k sobě. Chodítko je výškově nastavitelné.

NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA

Pro nastavení výšky chodítka zamáčkněte z obou stran pojistku (B) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.

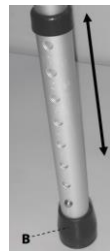

ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců, předních koleček a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí /zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno: Timago International Group Sp z o.o., Polsko
Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827



NÁVOD K POUŽITÍ CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ SKLÁDACÍ JMC 3016W5

POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn dvěma výškově nastavitelnými nohami s protiskluzovými pryžovými nástavci a dvěma výškově nastavitelnými nohami s plnými kolečky. Chodítko je vybaveno pojistkou sklápění (A) a ergonomickými pěnovými rukojeťmi.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška: 81-99 cm
Celková šířka: 63,5 cm
Celková hloubka: 51 cm
Hloubka ve složeném stavu: 11 cm
Průměr koleček: 12 cm
Hmotnost: 3,0 kg
Nosnost: 136 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 136 kg.


Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítko se čtyřmi výškově nastavitelnými nohami, z nichž přední dvě jsou vybaveny plnými kolečky.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ CHODÍTKA

Chodítko rozložte rozevřením boků chodítka směrem od sebe až do polohy, kdy zapadne bezpečnostní pojistka (A), chráněná plastovou krytkou, umístěná na horní vzpěře chodítka. Pro složení chodítka zmáčkněte bezpečnostní pojistku (A) a tlačte boky chodítka směrem k sobě. Chodítko je výškově nastavitelné.

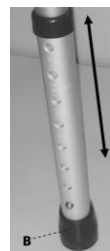

NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA

Pro nastavení výšky chodítka zamáčkněte z obou stran pojistku (B) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.

ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržívat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců, předních koleček a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí /zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.