

NÁVOD K POUŽITÍ

MADLO NA VANU

MOB003

POUŽITÍ

Madlo na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Madlo je vyrobeno z pevného plastu bílé barvy. Průměr a tvar madla výrazným způsobem usnadňuje snadnost a bezpečnost použití. Výška madla nad okraj vany je 41 cm.

Pro montáž madla není potřeba náradí. Odklopit páku přítlačného šroubu, aby se zvětšila mezera mezi přítlačnými plochami a nasadit mádlo na požadované místo na okraji vany tak, aby se přítlačný šroub nacházel z vnější strany vany. Ujistěte se, že je madlo ve svislé poloze a dotáhněte přítlačný šroub, aby se sevřely čelisti. Zaklopit páku, čímž se zvýší dotlak. Před prvním použitím zkontrolujte upevnění zkušebním zatížením.

Průměr madla: 38 cm

Výška madla nad okraj vany: 41 cm

Max. zatížení 120 kg

ÚDRŽBA

Lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální bezpečnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! V případě jakéhokoliv poškození, produkt nepoužívejte a obraťte se na prodávajícího!

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno: Mobilex Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín



NÁVOD K POUŽITÍ MADLO NA VANU

MOB003

POUŽITÍ

Madlo na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Madlo je vyrobeno z pevného plastu bílé barvy. Průměr a tvar madla výrazným způsobem usnadňuje snadnost a bezpečnost použití. Výška madla nad okraj vany je 41 cm.

Pro montáž madla není potřeba nářadí. Odklopit páku přítlačného šroubu, aby se zvětšila mezera mezi přítlačnými plochami a nasadit madlo na požadované místo na okraji vany tak, aby se přítlačný šroub nacházel z vnější strany vany. Ujistěte se, že je madlo ve svislé poloze a dotáhněte přítlačný šroub, aby se sevřely čelisti. Zaklopit páku, čímž se zvýší dotlak. Před prvním použitím zkontrolujte upevnění zkušebním zatížením.

Průměr madla: 38 cm

Výška madla nad okraj vany: 41 cm

Max. zatížení 120 kg

ÚDRŽBA

Lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nepůsobují mechanické narušení povrchu.

VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální bezpečnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! V případě jakéhokoliv poškození, produkt nepoužívejte a obraťte se na prodávajícího!

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakéhokoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno: Mobilex Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín

