

NÁVOD K POUŽITÍ
MADLO SKLOPNÉ K WC
MOB015 a 016

POUŽITÍ

Sklopné madlo k WC je součástí řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností či v případě zjištění závad, kontaktujte svého dodavatele. Poškozené madlo nepoužívejte ! Madlo může být připevněno pouze kvalifikovaným stavebním odborníkem. Ujistěte se, že nosná konstrukce je vhodná pro upevnění madla.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Madlo je vyrobeno z oceli vysoké pevnosti a je nalakováno bílou barvou. Průměr a tvar madla výrazným způsobem usnadňuje snadnost a bezpečnost použití. Je vybaveno pružinovým mechanismem, který zvedá madlo do svislé polohy, čímž šetří místo. Před použitím madlo sklopte do horizontální polohy, po použití se samočinně vrátí do svislé polohy.

Pro montáž madla budete potřebovat vrtačku pro zhotovení otvorů v nosné konstrukci, 6 šroubů s vhodnými hmoždinkami dle typu nosné konstrukce a klíč anebo šroubovák, dle typu šroubů.

1. Zvolte vhodné místo pro montáž s ohledem na funkčnost a výšku osoby, která bude madlo používat. Polze musí být taková, aby se madlo odklápělo nahoru do svislé polohy.
2. Označte místa pro vyvrtání otvorů. Velikost otvorů je závislá na typu nosné konstrukce a použitých hmoždinkách. Vyvrtejte otvory.
3. Vložte do otvorů hmoždinky, přiložte madlo a přes otvory v madle vložte šrouby do hmoždinek. Šrouby dobře utáhněte.
4. Zkontrolujte pevnost zkušebním zatížením madla. Nezatěžujte nad maximální zatížení.

Délka madla: 55 cm anebo 76 cm (dle typu)

Max. zatížení 120 kg

Hmotnost výrobku: 3,4 kg

ÚDRŽBA

Lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální bezpečnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! V případě jakéhokoliv poškození, produkt nepoužívejte a obraťte se na prodávajícího!

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

NÁVOD K POUŽITÍ

MADLO SKLOPNÉ K WC

MOB015 a 016

POUŽITÍ

Sklopné madlo k WC je součástí řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností či v případě zjištění závad, kontaktujte svého dodavatele. Poškozené madlo nepoužívejte ! Madlo může být připevněno pouze kvalifikovaným stavebním odborníkem. Ujistěte se, že nosná konstrukce je vhodná pro upevnění madla.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Madlo je vyrobeno z oceli vysoké pevnosti a je nalakováno bílou barvou. Průměr a tvar madla výrazným způsobem usnadňuje snadnost a bezpečnost použití. Je vybaveno pružinovým mechanismem, který zvedá madlo do svislé polohy, čímž šetří místo. Před použitím madlo sklopte do horizontální polohy, po použití se samočinně vrátí do svislé polohy.

Pro montáž madla budete potřebovat vrtačku pro zhotovení otvorů v nosné konstrukci, 6 šroubů s vhodnými hmoždinkami dle typu nosné konstrukce a klíč anebo šroubovák, dle typu šroubů.

1. Zvolte vhodné místo pro montáž s ohledem na funkčnost a výšku osoby, která bude madlo používat. Pozice musí být taková, aby se madlo odklápělo nahoru do svislé polohy.
2. Označte místa pro vyvrtání otvorů. Velikost otvorů je závislá na typu nosné konstrukce a použitých hmoždinkách. Vyvrtejte otvory.
3. Vložte do otvorů hmoždinky, přiložte madlo a přes otvory v madle vložte šrouby do hmoždinek. Šrouby dobře utáhněte.
4. Zkontrolujte pevnost zkušebním zatížením madla. Nezatěžujte nad maximální zatížení.

Délka madla: 55 cm anebo 76 cm (dle typu)

Max. zatížení 120 kg

Hmotnost výrobku: 3,4 kg

ÚDRŽBA

Lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální bezpečnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! V případě jakéhokoliv poškození, produkt nepoužívejte a obraťte se na prodávajícího!

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakéhokoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.