

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA NA VANU S MADLEM

MOB002

POUŽITÍ

Sedačka na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a výrazným způsobem usnadňuje instalaci do vany, která spočívá ve vymezení polohy bočních dorazových opěrek a následném usazení sedačky na protilehlé strany vany.

Plastové jádro sedačky je překryto tvarovanou celoplastovou sedací plochou. Lavice má zdrsňený protiskluzový povrch a místo pro odkládání mýdla. Gumová podložka zabraňuje klouzání lavice a poškrábání vany.

Optimální polohu dle šířky příslušné vany zajišťují čtyři boční dorazové opěrky, které je možné po jejich předchozím uvolnění obousměrně posunout a tím vymezit požadovanou polohu a následněm dotažením zajistit v nově zvolené poloze. Sedačka je vybavená podpůrným madlem. K jeho montáži použijte přiložené šrouby, které vložíte zespodu do otvorů v sedačce. Na šrouby nasadíte madlo a utáhnete šrouby ve směru hodinových ručiček.

Rozměry: šířka x délka x výška (cm): 70,5 x 32 x 18

Rozmezí regulace dorazových opěrek (cm): 41 – 64,5

Max. zatížení 120 kg

Váha 2,7 kg

ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s vhodným madlem.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobena: Mobilex Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827



NÁVOD K POUŽITÍ
SEDAČKA NA VANU S MADLEM
MOB002

POUŽITÍ

Sedačka na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a výrazným způsobem usnadňuje instalaci do vany, která spočívá ve vymezení polohy bočních dorazových opěrek a následném usazení sedačky na protilehlé strany vany.

Plastové jádro sedačky je překryto tvarovanou celoplastovou sedací plochou. Lavice má zdrsňený protiskluzový povrch a místo pro odkládání mýdla. Gumová podložka zabraňuje klouzání lavice a poškrábání vany.

Optimální polohu dle šířky příslušné vany zajišťují čtyři boční dorazové opěrky, které je možné po jejich předchozím uvolnění obousměrně posunout a tím vymezit požadovanou polohu a následně dotažením zajistit v nově zvolené poloze. Sedačka je vybavená podpůrným madlem. K jeho montáži použijte přiložené šrouby, které vložíte zespodu do otvorů v sedačce. Na šrouby nasadíte madlo a utáhnete šrouby ve směru hodinových ručiček.

Rozměry: šířka x délka x výška (cm): 70,5 x 32 x 18

Rozmezí regulace dorazových opěrek (cm): 41 – 64,5

Max. zatížení 120 kg

Váha 2,7 kg

ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s vhodným madlem.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno: Mobilex Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827

