

**NÁVOD K POUŽITÍ**  
**SEDAČKA DO VANY ZÁVĚSNÁ**  
**CA 336L, TGR LW 336L, FS 794, TGR-R LW794**

**POUŽITÍ**

Sedačka na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ**

Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a výrazným způsobem usnadňuje instalaci do vany standardních rozměrů, která spočívá v usazení sedačky na protilehlé strany vany. Sedačku je možné přizpůsobit dle šířky vany.

Plastové koncovky zabraňují klouzání lavice a poškrábání vany.

**Rozměry**

Sedátko: 42 x 23 cm


Rozteč podpěr (vnitřní rozměr vany):

v rozmezí min. 58 - 62 cm, max. 69 cm

Hloubka: sedák 10 cm pod okrajem vany

Hmotnost: 1,5 kg

Max. zatížení 100 kg

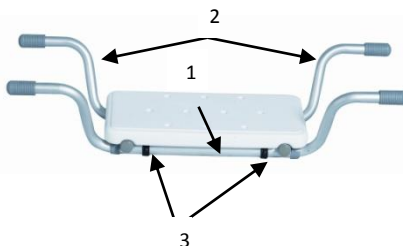

**MONTÁŽ:**

Na spodní části sedátka jsou trubky pro zasunutí podpěr (1). Po zasunutí podpěr (2) zafixujete rozteč dle požadované šířky (dvě možnosti rozteče) pomocí aretačních kolíčku s plastovou objímkou tak, že je zasunete do otvorů v trubce pod sedátkem a v podpěrách (3).

**ÚDRŽBA**

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

**VAROVÁNÍ**

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s vhodným madlem.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

**NÁVOD K POUŽITÍ**  
**SEDAČKA DO VANY ZÁVĚSNÁ**  
**CA 336L, TGR LW 336L, FS 794, TGR-R LW794**

**POUŽITÍ**

Sedačka na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ**

Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a výrazným způsobem usnadňuje instalaci do vany standardních rozměrů, která spočívá v usazení sedačky na protilehlé strany vany. Sedačku je možné přizpůsobit dle šířky vany.

Plastové koncovky zabraňují klouzání lavice a poškrábání vany.

**Rozměry**

Sedátko: 42 x 23 cm


Rozteč podpěr (vnitřní rozměr vany):

v rozmezí min. 58 - 62 cm, max. 69 cm

Hloubka: sedák 10 cm pod okrajem vany

Hmotnost: 1,5 kg

Max. zatížení 100 kg

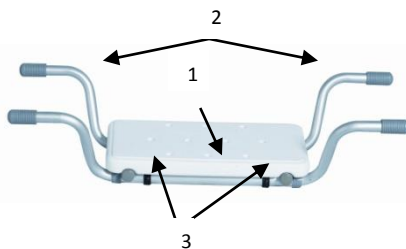

**MONTÁŽ:**

Na spodní části sedátka jsou trubky pro zasunutí podpěr (1). Po zasunutí podpěr (2) zafixujete rozteč dle požadované šířky (dvě možnosti rozteče) pomocí aretačních kolíčku s plastovou objímkou tak, že je zasunete do otvorů v trubce pod sedátkem a v podpěrách (3).

**ÚDRŽBA**

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

**VAROVÁNÍ**

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s vhodným madlem.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.