

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA DO SPRCHY NASTAVITELNÁ

FS797L (TGR KP340L) , 798L (TGR KP 350L), JMC-5040 (TGR KP O 3432)




POUŽITÍ : Sedačky pod sprchu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS :


Rám sedačky, který je vyroben z odlehčených duralových trubek, je doplněn plastovým hygienickým sedátkem. Opěrné nohy, které umožňují výškové nastavení sedačky, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze. Typ FS798 je navíc vybaven opěradlem.



Obr.1

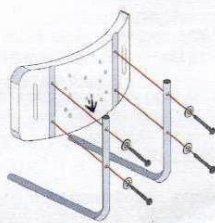

Obr.2

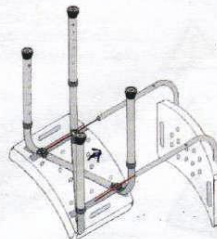

Obr.3

MONTÁŽ:

Typy bez opěradla (FS797 a JMC5040)- pomocí 5-ti šroubů s podložkami spojte nohy do kříže se sedákem dle obrázku 1.

Typ s opěradlem (FS798)– nejdříve spojte pomocí pouze jednoho kratšího šroubu s podložkou nohy do kříže se sedákem (obr.1 – prostřední šroub) do kříže se sedákem.

Smontujte opěradlo dle obr.2 - použijte 4 kratší šrouby s podložkami. Šipka vylišaná na opěradle by měla směřovat dolů. Spojte opěradlo se sedákem dle obr.3 – použijte 4 delší šrouby+podložky. Šipka vylišaná na sedáku by měla směřovat směrem k opěradlu. Dotáhněte všechny šrouby.

	FS797	FS798	JMC5040
typ sedáku	obdelníkový	obdelníkový	kulatý
šířka x hloubka sedáku cm	49 x 29	49 x 29	Ø32
Výška sedu (nastavitelná po 2,5 cm)	34 - 44	34 - 44	35,5 - 51
Výška vč. opěradla cm	-	74 - 84	-
max.nosnost	100 kg	100 kg	90 kg
hmotnost	2,2 kg	2,8 kg	3 kg

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pokud dojde k opotřebení gumových protiskluzných nástavců, vyměňte je za nové.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s vhodným madlem. Nepřekračujte maximální nosnost.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na protiskluzné nástavce. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.



NÁVOD K POUŽITÍ SEDAČKA DO SPRCHY NASTAVITELNÁ FS797L (TGR KP340L) , 798L (TGR KP 350L), JMC-5040 (TGR KP O 3432)



POUŽITÍ : Sedačky pod sprchu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS :

Rám sedačky, který je vyroben z odlehčených duralových trubek, je doplněn plastovým hygienickým sedátkem. Opěrné nohy, které umožňují výškové nastavení sedačky, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze. Typ FS798 je navíc vybaven opěradlem.

MONTÁŽ:

Typy bez opěradla (FS797 a JMC5040)- pomocí 5-ti šroubů s podložkami spojte nohy do kříže se sedákem dle obrázku 1.

Typ s opěradlem (FS798)– nejdříve spojte pomocí pouze jednoho kratšího šroubu s podložkou nohy (obr.1 – prostřední šroub) do kříže se sedákem.

Smontujte opěradlo dle obr.2 - použijte 4 kratší šrouby s podložkami. Šipka vyliisovaná na opěradle by měla směřovat dolů. Spojte opěradlo se sedákem dle obr.3 – použijte 4 delší šrouby+podložky. Šipka vyliisovaná na sedáku by měla směřovat směrem k opěradlu. Dotáhněte všechny šrouby.

	FS797	FS798	JMC5040
typ sedáku	obdelníkový	obdelníkový	kulatý
šířka x hloubka sedáku cm	49 x 29	49 x 29	Ø32
Výška sedu (nastavitelná po 2,5 cm)	34 - 44	34 - 44	35,5 - 51
Výška vč. opěradla cm	-	74 - 84	-
max.nosnost	100 kg	100 kg	90 kg
hmotnost	2,2 kg	2,8 kg	3 kg

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nepůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pokud dojde k opotřebení gumových protiskluzných nástavců, vyměňte je za nové.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s vhodným madlem. Nepřekračujte maximální nosnost.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na protiskluzné nástavce. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.