

TOALETNÍ KŘESLO FS894, FS696

Návod k obsluze



Popis:

Nosná konstrukce je z chromované oceli, skládací. Model FS696 má kolečka, z toho zadní jsou vybavena brzdami. Plastové područky. Součástí je plastová sanitární nádoba s víkem, která je snadno vyjímatelná a záchodové prkénko. Pro optimální nastavení výšky sedadla všechny nohy jsou vybaveny výsuvnými prvky. Možný rozsah nastavení výšky od 43 až 53 cm (po 2,5 cm) Šířka celková: 53 cm
Nosnost : 100 kg
Hmotnost: 7,1 kg (FS894), 7,5 kg (FS696)

Účel:

Slouží jako přenosné WC s toaletní nádobou umístěnou pod sedadlem. Cílem je usnadnění každodenní hygieny pacientů.

Použití:

Rozložení: roztáhněte strany vozíku v úhlu 90° vzhledem k opěrce a umístěte na nich příčnou vzpěru pomocí háčků. Nasaďte toaletní nádobu na rám pod prkénkem. Než začnete používat toaletní křeslo, nastavte výšku sedadla tak, že stlačíte kovový aretační kolík na noze a vyberte vhodnou polohu vnitřní trubky. Po nastavení zablokujte kolík do původní polohy (musí zacvaknout do otvoru). Vždy zkontrolujte, zda toaletní nádoba je nasazena pod sedadlem. Pro složení (pouze pro model FS696) vytáhněte toaletní kontejner, zvedněte nahoru přední díl rámu, odkloňte jednu stranu do předu a druhou do zadu.

Chcete-li pomůcku používat bezpečně, měli by jste se ujistit, zda vozík je zcela rozložen, a že stojí na rovné ploše, a v případě vozíku na kolečkách, zda brzdy jsou blokovány proti pohybu. Zvedněte víko toalety, a odstraňte víko nádoby. Po použití zakryjte nádobu víkem, aby se zabránilo úniku zápachu, a pak dejte toaletní sedátko s poklopem do vodorovné polohy.

Čištění a údržba:

Pomůcku lze čistit a udržovat běžnými čistícími a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pomůcku osušte. V případě nutnosti desinfekce, používejte pouze prostředky určené k desinfekci chromovaných povrchů a plastů. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků.

Upozornění:

Před použitím zkontrolujte správné zacvaknutí aretačních kolíků na nohách konstrukce- tak, aby byly blokovány pozice trubek vůči sebe. Nepřekračujte maximální nosnost.

Záruka:

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na gumové krytky. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než prodávajícím.

TOALETNÍ KŘESLO FS894, FS696

Návod k obsluze

Popis:

Nosná konstrukce je z chromované oceli, skládací. Model FS696 má kolečka, z toho zadní jsou vybavena brzdami. Plastové područky. Součástí je plastová sanitární nádoba s víkem, která je snadno vyjímatelná a záchodové prkénko. Pro optimální nastavení výšky sedadla všechny nohy jsou vybaveny výsuvnými prvky. Možný rozsah nastavení výšky od 43 až 53 cm (po 2,5 cm) Šířka celková: 53 cm
Nosnost : 100 kg
Hmotnost: 7,1 kg (FS894), 7,5 kg (FS696)

Účel:

Slouží jako přenosné WC s toaletní nádobou umístěnou pod sedadlem. Cílem je usnadnění každodenní hygieny pacientů.

Použití:

Rozložení: roztáhněte strany vozíku v úhlu 90° vzhledem k opěrci a umístěte na nich příčnou vzpěru pomocí háčků. Nasaďte toaletní nádobu na rám pod prkénkem. Než začnete používat toaletní křeslo, nastavte výšku sedadla tak, že stlačíte kovový aretační kolík na noze a vyberte vhodnou polohu vnitřní trubky. Po nastavení zablokujte kolík do původní polohy (musí zacvaknout do otvoru). Vždy zkontrolujte, zda toaletní nádoba je nasazena pod sedadlem. Pro složení (pouze pro model FS696) vytáhněte toaletní kontejner, zvedněte nahoru přední díl rámu, odkloňte jednu stranu do předu a druhou do zadu.

Chcete-li pomůcku používat bezpečně, měli byste se ujistit, zda vozík je zcela rozložen, a že stojí na rovné ploše, a v případě vozíku na kolečkách, zda brzdy jsou blokovány proti pohybu. Zvedněte víko toalety, a odstraňte víko nádoby. Po použití zakryjte nádobu víkem, aby se zabránilo úniku zápachu, a pak dejte toaletní sedátko s poklopem do vodorovné polohy.

Čištění a údržba:

Pomůcku lze čistit a udržovat běžnými čistícími a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pomůcku osušte. V případě nutnosti desinfekce, používejte pouze prostředky určené k desinfekci chromovaných povrchů a plastů. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jističích prvků.

Upozornění:

Před použitím zkontrolujte správné zacvaknutí aretačních kolíků na nohách konstrukce- tak, aby byly blokovány pozice trubek vůči sebe. Nepřekračujte maximální nosnost.

Záruka:

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na gumové krytky. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než prodávajícím.