

ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bowdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. Skladovat v suchých prostorech.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí/zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než prodávajícím.

NÁVOD K POUŽITÍ CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ TGR RS 881

POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými rukojeťmi. Chodítko je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace, sedátkem, jídelním táčem a nákupním košíkem.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška : 75-98cm

Šířka sedátka: 42cm

Celková šířka: 61 cm

Celková hloubka: 65cm

Hmotnost: 10kg

Nosnost: 135kg (včetně nosnosti košíku 12kg)

Vyrobeno: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko

Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte chodítko k sezení.

Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost je 110 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li chodítko v klidu, vždy zaaretujte brzdy (před a po použití).

Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívat na mokřích plochách a plochách s nánosem písku, oleje a na náledí.


Chodítko je určeno k používání na rovných plochách s maximálním sklonem 5%.

Chodítko není určeno pro transport sedících uživatelů.

V případě zjištění jakékoliv závady, pomůcku nepoužívejte a obraťte se na prodávajícího.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítko s madly, jídelní táč, nákupní košík a 2 šrouby k zajištění nastavení výšky madel.

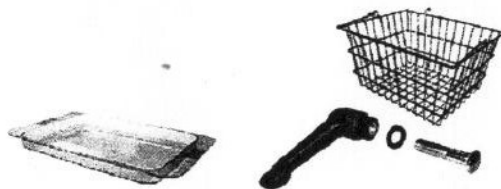

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA


Rozevřete rám chodítka a vyjměte zaslepovací špunty (A) z držáků výsuvných madel (obrázek 1)

Nainstalujte oba šrouby (B-D) a podložku (C) do držáku tak, jak je uvedeno na obrázku a nechte je povolené (obrázek 2)


Zasuňte obě madla do držáku, nastavte potřebnou výšku a šroubem tuto pozici zaaretujte.

Bowdenová lanka by měla vézt zevně rámu i madel (obrázek 3)


obrázek 1

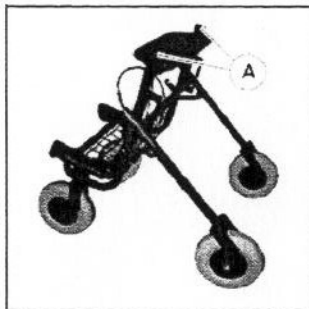

obrázek 2

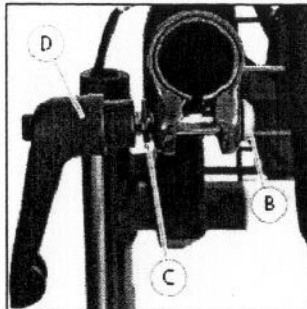


obrázek 3

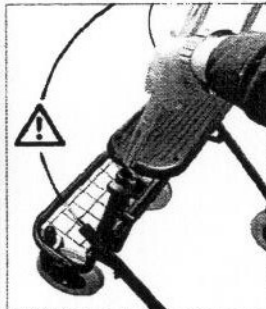


BRZDY

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy (A) směrem nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačením páky brzdy směrem dolů, by se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Vždy používejte obě brzdy !!!

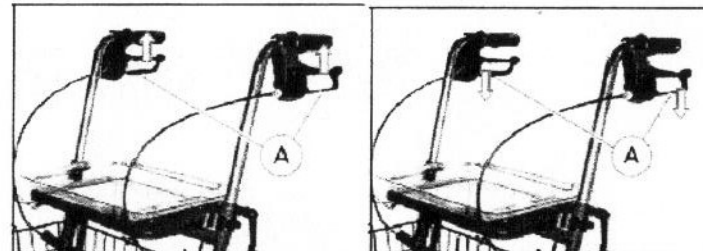

Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrzdění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídte brzdy pomocí šroubů bowdenového lanka.

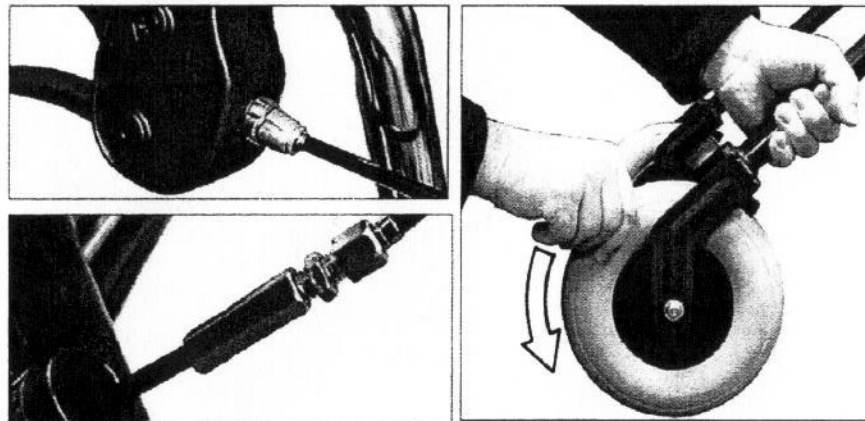

TRANSPORTNÍ A SKLADOVACÍ POLOHA

Uvolněním aretační pojistky (C) a vytažením zadního rámu nahoru lze chodítko jednoduše složit do transportní polohy (A). Při rozložení postupujte opačným způsobem (A-C)

